



Надліжкова трапеція

OSD-96V

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС

ЗМІСТ

1. Вступ.....	3
2. Заходи безпеки	3
3. Технічні характеристики.....	3
4. Загальна характеристика.....	4
5. Технічне обслуговування і догляд.....	4
6. Умови гарантії	5

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь-ласка уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



- УВАГА** Не використовуйте трапецію, не ознайомившись з Інструкцією.
- Не використовуйте трапецію у випадку пошкодження.
- Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Надліжкова трапеція «OSD-96V» (далі за паспортом – трапеція) – рекомендована для застосування у медичних закладах та вдома.

Надліжкова трапеція «OSD-96V» розроблена для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

2. Заходи безпеки

- Максимально допустиме навантаження на трапецію – 70 кг. **НІКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
- Виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- Трапеція **ПОВИННА** бути закріплена правильно та надійно.
- ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан трапеції перед кожним використанням. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб у випадку зносу або пошкодження.
- На разі використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично ретельно дезінфікувати його для уникнення перехресних інфекцій.
- Перед початком використання трапеції або під час використання після тривалого зберігання **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що всі частини закріплені та міцно зафіксовані.
- Будь-які пошкодження повинні бути **УСУНУТІ**.
- Поверхню трапеції **ПОТРІБНО** чистити за допомогою м'якого сухого миючого засобу. Засоби для чищення повинні бути м'якими. Можна використовувати побутові очисні засоби.
- Під час установа та регулювання трапеції **ОСТЕРІГАЙТЕСЯ** затиску пальців рук.



- УВАГА** Під час повторного використання трапеції необхідно її протерти та продезінфікувати, а також провести загальний огляд технічного стану.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування трапеції, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-96V

Матеріал:	сталь
Висота до рукоятки, (см):	до 180
Максимальне навантаження, (кг):	70

4. Загальна характеристика

Надліжкову трапецію «OSD-96V» необхідно відрегулювати за висотою до початку експлуатації. Виріб повністю розбирається та компактно складається, що спрощує транспортування, зберігання та переміщення.

Усі матеріали, застосовані у виробництві, є біологічно безпечними для шкіри пацієнтів та медичного персоналу.

Надліжкова трапеція «OSD-96V» поставляється у зібраному вигляді.

5. Технічне обслуговування і догляд



Перевіряйте справність трапеції перед кожним використанням, якщо виріб використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. На разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

Надліжкова трапеція розроблена для застосування протягом тривалого часу. Термін її придатності 10 років за умов дотримання усіх правил експлуатації.

Багаторазове пересування, неправильне використання, а також тривале застосування можуть призвести до пошкоджень й ознак зносу, що може створити привід до несправності виробу, якщо не усувати такі дефекти вчасно.

Догляд

Чистити поверхню трапеції необхідно м'якою ганчіркою. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати.

На разі забруднення трапеції інфекційними або потенційно небезпечними речовинами необхідно продезінфікувати миючим засобом.

Зберігайте надліжкову трапецію в сухому місці, подалі від води.

Регулярно оглядайте усі компоненти трапеції на відсутність зовнішніх пошкоджень. Перевіряйте надійність фіксації усіх кріплень та болтів. На разі виявлення дефектів подальша експлуатація трапеції можлива тільки опісля усунення усіх несправностей. По закінченню терміну експлуатації трапецію необхідно утилізувати згідно з чинним законодавством України.



У лікарнях необхідна постійна дезінфекція. На разі використання виробу різними пацієнтами рекомендується систематично і ретельно мити та дезінфікувати трапецію, щоб уникнути інфекцій.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції трапеції, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



6. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:
Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____