



Милиця з підтримкою підлокітника

OSD-BL580203

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС

ЗМІСТ

1. Вступ	3
2. Заходи безпеки.....	3
3. Технічні характеристики.....	4
4. Використання.....	4
5. Технічне обслуговування і догляд.....	4
6. Умови гарантії.....	5

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь-ласка уважно ознайомтесь з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання виробу.

УВАГА



Не використовуйте милицю не ознайомившись з інструкцією.

Не використовуйте милицю у випадку її пошкодження.

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Милиця з підтримкою підлокітника «OSD-BL580203» – рекомендована для застосування літнім, слабким та сліпим людям, а також людям з обмеженими функціональними можливостями нижніх кінцівок. Використовується для полегшення самостійного пересування інвалідів, літніх людей, хворих у реабілітаційний період після травм і операцій.

Милиці «OSD» розроблені для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

2. Заходи безпеки

1. Перед початком використання милиці або під час використання після тривалого зберігання **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що всі частини закріплені та міцно зафіксовані.
2. Регулярно **ПЕРЕВІРЯЙТЕ** загальний технічний стан милиці, адже усі елементи з часом зношуються. Особливо це стосується наконечника, тому стежте за його станом та вчасно **ЗАМІНЮЙТЕ**.
3. Якщо виявлено несправність, то **НЕ ПРОВОДЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
4. Будьте обачні на слизькій дорозі. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** милицю як інструмент для спуску або засіб для самозахисту.

УВАГА



Не використовуйте ручку милиці в якості підставки для ніг або опертя для сидіння.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування милиці, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-BL580203
Загальна висота, (см):	95,5 – 118,5
Максимальне навантаження, (кг):	90
Вага, (кг):	0,98

4. Використання

Регулювання висоти

Для того, щоб відрегулювати необхідну висоту милиці потрібно взяти нижню частину трубки, натиснути на кнопку та потягнути за верхню та нижню частини милиці. Кнопка повинна попасти та бути зафіксованою в необхідному отворі.

УВАГА



Використовуйте наконечники для запобігання пошкоджень.

5. Технічне обслуговування і догляд

УВАГА



Перевіряйте справність милиці перед кожним використанням, якщо милиця використовується не регулярно, то оглядайте її мінімум раз на шість місяців. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, не використовуйте виріб.

Догляд

Чистити милицю необхідно тільки сухою та м'якою ганчіркою.

Зберігання

Милицю потрібно зберігати у сухому місці.



6. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:
Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____