



Ходуни з колесами

OSD-91010F

Інструкція по використанню



Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції.

Будь-ласка уважно ознайомтеся з цією інструкцією і дотримуйтеся її під час використання виробу.



Цей виріб відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЕЕС

Офіційна веб-сторінка: [osd.ua](http://osd.ua)

ХОДУНИ З КОЛЕСАМИ.....	1
OSD-91010F .....	1
ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ .....	1
<b>1. Попередження.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Технічні характеристики .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Використання та обслуговування .....</b>	<b>3</b>
а) Відчинення/зачинення.....	3
б) Регулювання висоти.....	3
в) Використання .....	3
г) Догляд за виробом .....	3
<b>4. Умови гарантії .....</b>	<b>4</b>

## 1. Попередження

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції.

Будь-ласка уважно ознайомтеся з цією інструкцією і дотримуйтеся її під час використання виробу.

OSD гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.



- До початку експлуатації ретельно вивчіть цю інструкцію.
- завжди перевіряйте, що пристрій знаходиться у робочому стані, перш ніж використовувати його. Не використовуйте виріб у разі зносу або у випадку пошкодження.
- максимальне навантаження 136 кг. Ніколи не перевищують цей ліміт.

## 2. Технічні характеристики

	У відчиненому положенні	У зачиненому положенні
<b>ГЛУБИНА</b>	49 см	12 см
<b>Ширина</b>	55 см	55 см
<b>Висота</b>	79/97 см	79/97
<b>Вага</b>	2,7 кг	2,7 кг
<b>Навантаження</b>	136 кг	136 кг

## 3. Використання та обслуговування

### а) Відчинення/зачинення.

Щоб відкрити ходунки витягніть назовні дві бічні частини, поки не почуєте клацання. Щоб закрити ходунки натисніть центральну кнопку і поверніть бічну частину.

### б) Регулювання висоти

Регулювання відбувається за допомогою кнопок на кожній ніжці. Встановіть потрібну висоту ніжок. Як тільки кнопка потрапить в отвір на ніжці, висота буде зафіксована. Переконайтеся в тому, що всі ніжки мають однакову висоту, а всі кнопки потрапили у відповідні отвори.

### в) Використання

Поставте ходунки вперед собою. Піднявши задню частину, підкотите їх на півкроку вперед. Потім переміщаєте ноги. Для переміщення вперед, повторіть зазначені вище рекомендації.

### г) Догляд за виробом

- Вимийте металеві частини ходунків в теплій воді з «м'яким» засобом для чистки.

- Протріть м'якою, чистою тканиною.
- У разі потреби, використайте дезінфікуючий засіб, а потім протріть досуха.

Замініть гумові наконечники у разі їх зносу.

#### 4. Умови гарантії

ТОВ "ОСД Східна Європа" гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - а) порушення правил експлуатації, викладених у інструкції;
  - б) при наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
  - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України "Про захист прав споживачів":

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, що він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів може бути змінена виробником без попереднього повідомлення.**

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_