



Ходуни універсальні

OSD-RB-1107

Інструкція по використанню



Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції.

Будь-ласка уважно ознайомтеся з цією інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



Цей виріб відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЕЕС

Офіційна веб-сторінка: [osd.ua](http://osd.ua)

ХОДУНИ УНІВЕРСАЛЬНІ.....	1
OSD-RB-1107.....	1
ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ .....	1
1. Попередження.....	3
2. Технічні характеристики .....	3
3. Використання та обслуговування .....	3
а) Відчинення/зачинення.....	3
б) Регулювання висоти.....	3
в) Використання .....	4
г) Догляд за виробом .....	4
4. Умови гарантії .....	4

## 1. Попередження

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції.

Будь-ласка уважно ознайомтеся з цією інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу. OSD гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.



- До початку експлуатації ретельно вивчіть цю інструкцію.
- завжди перевіряйте, що пристрій знаходиться у робочому стані, перш ніж використовувати

	<b>У відчиненому положенні</b>	<b>У зачиненому положенні</b>
<b>ГЛУБИНА</b>	43 см	12 см
<b>Ширина</b>	50 см	50 см
<b>Висота</b>	76/98 см	76/98
<b>Вага</b>	2,7 кг	2,7 кг
<b>Навантаження</b>	136 кг	136 кг

Його. Не використовуйте виріб у разі зносу або у випадку пошкодження.

- максимальне навантаження 136 кг. Ніколи не перевищують цей ліміт.

## 2. Технічні характеристики

### 3. Використання та обслуговування

#### а) Відчинення/зачинення.

Щоб відкрити ходунки витягніть назовні дві бічні частини, поки не почуете клацання. Щоб закрити ходуни натисніть центральну кнопку і поверніть бічну частину.

#### б) Регулювання висоти

Регулювання відбувається за допомогою кнопок на кожній ніжці. Встановіть потрібну висоту ніжок. Як тільки кнопка потрапить в отвір на ніжці, висота буде зафікована. Переконайтесь в тому, що всі ніжки мають однакову висоту, а всі кнопки потрапили у відповідні отвори.

## **в) Використання**

Універсальні ходунки OSD-RB-1107 мають дві рукоятки, одночасно піднімаючи які ви робите їх фікованими, опускаючи – крокуючими.

Використання у фікованому режимі:

Перемістіть ходунки вперед на відстань, що дорівнює вашому стандартному кроку. Потім, спираючись на ходунки, перемістіть ногу до висуненої вперед частини ходунків, далі – другу ногу. Для переміщення повторіть вказані вище рекомендації.

Використання у крокуючому режимі:

Розташуйте ходуни перед собою. Перемістіть одну сторону ходунів на кілька сантиметрів вперед. Потім пересуваєте ногу до висунутої вперед частини ходунів. Те ж саме робите з іншою частиною ходунів. Для переміщення вперед, повторіть зазначені вище рекомендації.

## **г) Догляд за виробом**

- Вимийте металеві частини ходунків в теплій воді з «м'яким» очищуючим засобом.
- Протріть м'якою, чистою тканиною.
- У разі потреби, використайте дезінфікуючий засіб, а потім протріть досуха.
- Замініть гумові наконечники у разі їх зносу.

## **4. Умови гарантії**

ТОВ “ОСД Східна Європа” гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.

2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:

- а) порушення правил експлуатації, викладених у інструкції;
- б) при наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
- в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.

3. Гарантія не розповсюджується на:

- а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
- б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
- в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.

4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (четирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України "Про захист прав споживачів":

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, що він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів може бути змінена виробником без попереднього попередження.**

Дата продажу:\_\_\_\_\_

Підпис/Печатка:\_\_\_\_\_