

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу. Збережіть її для отримання необхідної інформації у майбутньому.

#### Показання до застосування:

1. У період реабілітації після операцій.
2. При постійній нестабільності суглоба з метою підтримки необхідної для комфортного переміщення рухливості.
3. При великих розривах зв'язок.
4. При хронічних захворюваннях опорно-рухового апарату, артритих, артрозах тощо.
5. Для профілактики захворювань, пов'язаних з пошкодженням гомілковостопного суглоба.

#### Протипоказання до застосування:


1. Післяопераційні шви в області застосування.
2. Захворювання шкіри.
3. Алергічні реакції на компоненти, з яких виготовлений бандаж.

#### Технічні характеристики

Параметр:	Значення:
Модель:	0333
Тип бандажа:	пов'язка на гомілковостопний суглоб
Матеріал:	тканий еластичний матеріал
Колір:	бежевий
Ступінь фіксації:	еластичний
Розміри, (см):	S (19-22) M (22-25) L (25-28) XL (28-31) XXL (31-34)


#### Догляд

З метою захисту бандажа від пошкоджень і забезпечення правильної експлуатації виробу необхідно виконувати наступні вимоги:

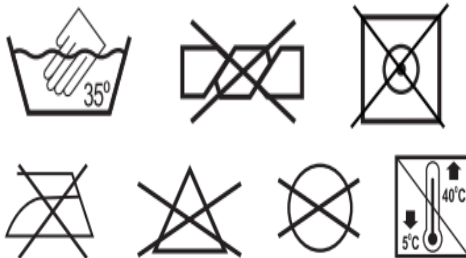

1. Прати м'якими миючими засобами за температури не вище +35° С.
2. Під час прання та/або полоскання не терти і не викручувати.
3. Сушити далеко від джерел тепла.
4. Не прасувати.
5. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор).
6. Не піддавати сухому хімічному чищенню.

**Виріб «0333»** відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

 **Виробник:** Anatomic Help S.A. / Анатомік Хелп С.А.

25th Km Thessaloniki-Kilkis, 611 00 N.,  
Santa Greece / 25 Км Зессалонікі-Кілкіс,  
611 00 N., Греція.

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

**Номер редакції:** № 7 від 12.06.2019.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

**Гарантійний термін:** 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

