

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу. Збережіть її для отримання необхідної інформації у майбутньому.

#### Показання до застосування:

- У період реабілітації після операцій.
- При постійній нестабільноті суглоба з метою підтримки необхідної для комфорного переміщення рухливості.
- При великих розривах зв'язок.
- Для повної іммобілізації гомілковостопного суглоба (використовується за призначенням лікаря у якості альтернативи гіпсу).
- При хронічних захворюваннях опорно-рухового апарату, артритах, артрозах тощо.
- Для профілактики захворювань, пов'язаних з пошкодженням гомілковостопного суглоба.

#### Протипоказання до застосування:


- Післяоперативні шви в області застосування.
- Захворювання шкіри.
- Алергічні реакції на компоненти, з яких виготовлений бандаж.

#### Технічні характеристики

Параметр:	Значення:
Модель:	0336
Тип бандажа:	ортез на гомілковостопний суглоб
Матеріал:	неопрен, пластмаса, гума
Колір:	сірий
Ступінь фіксації:	жорстка
Ребра жорсткості:	2 металевих ребра жорсткості
Розміри, (см):	S (35-38) M (39-42) L (43-46)

#### Догляд

З метою захисту бандажа від пошкоджень і забезпечення правильної експлуатації виробу необхідно виконувати наступні вимоги:

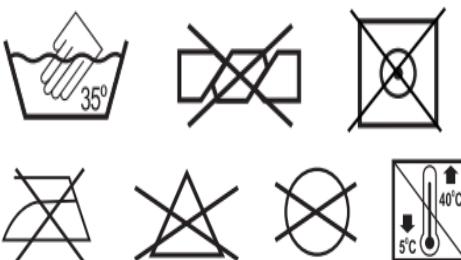

- Прати м'якими миючими засобами за температури не вище +35° С.
- Під час прання та/або полоскання не терти і не викручувати.
- Сушити далеко від джерел тепла.
- Не прасувати.
- Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор).
- Не піддавати сухому хімічному чищенню.

**Виріб «0336»** відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

**Виробник:** Anatomic Help S.A. / Анатомік Хелп С.А.

25th Km Thessaloniki-Kilkis, 611 00 N., Santa Greece / 25 Км Зессалонікі-Кілкіс, 611 00 Н., Греція.

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

**Номер редакції:** № 7 від 12.06.2019.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

**Гарантійний термін:** 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

