



**Бандаж на коліно:
1501**

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу. Збережіть її для отримання необхідної інформації у майбутньому.

Показання до застосування:

1. У період реабілітації після операцій на коліні.
2. У разі вивихів та крововиливів у м'язях.
3. При переломі та інших травмах коліна.
4. Для профілактики розвитку захворювань суглобів, зокрема, артрозу.
5. При наявності захворювань хрящів (хвороба Осгуда-Шляттера).
6. У разі хронічної нестабільності суглоба.

Протипоказання до застосування:


1. Післяопераційні шви в області застосування.
2. Захворювання шкіри.
3. Алергічні реакції на компоненти, з яких виготовлений бандаж.

Технічні характеристики

Параметр:	Значення:
Модель:	1501
Тип бандажа:	бандаж на коліно
Матеріал:	щільний трикотаж з посиленою компресією
Ступінь фіксації:	еластичний
Розміри, (см):	S (29-33) M (33-38) L (38-43) XL (43-50) XXL (50-60)


Догляд

З метою захисту бандажа від пошкоджень і забезпечення правильної експлуатації виробу необхідно виконувати наступні вимоги:

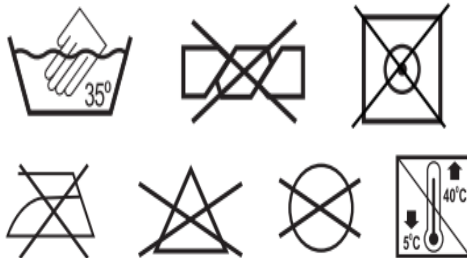

1. Прати м'якими миючими засобами за температури не вище +35° С.
2. Під час прання та/або полоскання не терти і не викручувати.
3. Сушити далеко від джерел тепла.
4. Не прасувати.
5. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор).
6. Не піддавати сухому хімічному чищенню.

Виріб «1501» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

 **Виробник:** Anatomic Help S.A. / Анатомік Хелп С.А.

25th Km Thessaloniki-Kilkis, 611 00 N.,
Santa Greece / 25 Км Зессалонікі-Кілкис,
611 00 N., Греція.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 7 від 12.06.2019.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін: 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

