



Фіксатор колінного суглоба: 2070

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу. Збережіть її для отримання необхідної інформації у майбутньому.

Показання до застосування:

1. У період реабілітації після операцій на коліні.
2. У разі вивихів та крововиливів у м'яз-зах.
3. При переломі та інших травмах колі-на.
4. Для повної іммобілізації колінного суглоба (використовується за призначенням лікаря у якості альтернативи гіпсу).
5. Для профілактики розвитку захворю-вань суглобів, зокрема, артрозу.
6. При наявності захворювань хрящів (хвороба Осгуда-Шляттера).
7. У разі хронічної нестабільності сугло-ба.

Протипоказання до застосування:


1. Післяопераційні шви в області засто-сування.
2. Захворювання шкіри.
3. Алергічні реакції на компоненти, з яких виготовлений бандаж.

Технічні характеристики

Параметр:	Значення:
Модель:	2070
Тип бандажа:	фіксатор
Матеріал:	спінений матеріал
Колір:	чорний
Рєбра жорсткості:	6 алюмінієвих пла-стин, мультицентрич-ний механізм
Ступінь фіксації:	жорстка
Висота, (см):	40
Розміри, (см):	універсальний розмір

Догляд

З метою захисту бандажа від пошкод-жень і забезпечення правильної експлу-атації виробу необхідно виконувати на-ступні вимоги:

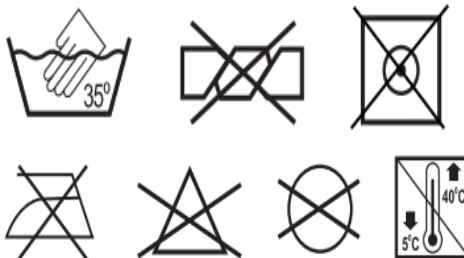

1. Прати м'якими миючими засобами за температури не вище +35° С.
2. Під час прання та/або полоскання не терти і не викручувати.
3. Сушити далеко від джерел тепла.
4. Не прасувати.
5. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор).
6. Не піддавати сухому хімічному чи-щенню.

Виріб «2070» відповідає технічним ви-могам і визнаний придатним для експлу-атації.



Виробник: Anatomic Help S.A. /
Анатомік Хелп С.А.

25th Km Thessaloniki-Kilkis, 611 00 N.,
Santa Greece / 25 Км Зессалонікі-Кілкис,
611 00 Н., Греція.

Уповноважений представник вироб-ника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Євро-па»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр.
40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 7 від 12.06.2019.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін: 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил ек-сплуатації виробу, зазначених у Інструкції.

