



Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу. Збережіть її для отримання необхідної інформації у майбутньому.

Показання до застосування:

1. У період реабілітації після операцій на коліні.
2. У разі вивихів та крововиливів у м'язах.
3. При переломі та інших травмах коліна.
4. Для повної іммобілізації колінного суглоба (використовується за призначенням лікаря у якості альтернативи гіпсу).
5. Для профілактики розвитку захворювань суглобів, зокрема, артрозу.
6. При наявності захворювань хрящів (хвороба Осгуда-Шляттера).
7. У разі хронічної нестабільності суглоба.

Протипоказання до застосування:


1. Післяопераційні шви в області застосування.
2. Захворювання шкіри.
3. Алергічні реакції на компоненти, з яких виготовлений бандаж.

Технічні характеристики

Параметр:	Значення:
Модель:	7091
Тип бандажа:	тутор
Матеріал:	неопрен
Колір:	чорний
Ребра жорсткості:	5 алюмінієвих пластин
Висота, (см):	40; 60
Ступінь фіксації:	повна іммобілізація колінного суглоба
Область колінної чашечки:	закрита
Розміри, (см):	універсальний

Догляд

З метою захисту бандажа від пошкоджень і забезпечення правильної експлуатації виробу необхідно виконувати наступні вимоги:

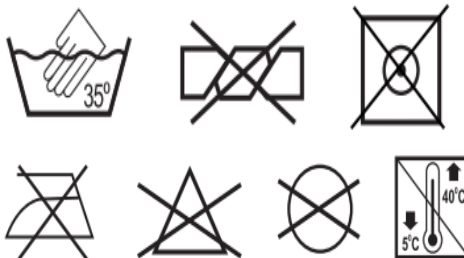

1. Прати м'якими миючими засобами за температури не вище +35° С.
2. Під час прання та/або полоскання не терти і не викручувати.
3. Сушити далеко від джерел тепла.
4. Не прасувати.
5. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор).
6. Не піддавати сухому хімічному чищенню.

Виріб «7091» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.



Виробник: Anatomic Help S.A. /
Анатомік Хелп С.А.

25th Km Thessaloniki-Kilkis, 611 00 N.,
Santa Greece / 25 Км Зессалонікі-Кілкис,
611 00 N., Греція.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 7 від 12.06.2019.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін: 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

