

Бандаж на гомілковостопний суглоб

OSD-ARA5402

Інструкція

Показання до застосування:

У період реабілітації після операцій, при постійній нестабільності суглоба з метою підтримки необхідної для комфортного переміщення рухливості, при великих розривах зв'язок, при хронічних захворюваннях опорно-рухового апарату, артритах, артрозах тощо, для профілактики захворювань, пов'язаних з пошкодженням гомілковостопного суглоба.

Протипоказання до застосування:

Післяопераційні шви в області застосування, захворювання шкіри, алергічні реакції на компоненти, з яких виготовлений бандаж.

Догляд

З метою захисту бандажа від пошкоджень і забезпечення правильної експлуатації виробу необхідно виконувати наступні вимоги: прати м'якими миючими засобами за температури не вище +35 °С, під час прання та/або полоскання не терти і не викручувати, сушити далеко від джерел тепла, не прасувати, не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор), не піддавати сухому хімічному чищенню, зберігати у сухому місці за температури від + 5 °С до + 40 °С, далеко від джерел тепла, прямих сонячних променів і пилу.

Дата виготовлення: 11. 2019.



Гарантійний термін: 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

Параметр	Значення
Модель:	OSD-ARA5402
Тип бандажа:	бандаж на гомілковостопний суглоб
Матеріал:	неопрен – 70 % (3 мм), нейлон «Джерси» – 30 %.
Колір:	чорний
Рембра жорсткості:	2 знімні пластикові шини
Розміри, (см):	універсальний



35 °C

