



Турот колінного суглоба:

OSD-ARK1055

Інструкція

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією та дотримуйтесь її під час використання виробу.



Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях. Виріб розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.
Виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.



Запобігайте контакту продукту з гострими предметами, а також потраплянню попелу від цигарок.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

- 1. У період реабілітації після операцій на коліні.
- 2. У разі вивихів та крововиливів у м'язах.
- 3. При переломі та інших травмах коліна.
- 4. Для повної іммобілізації колінного суглоба (використовується за призначенням лікаря у якості альтернативи гіпсу).
- 5. Для профілактики розвитку захворювань суглобів, зокрема, артрозу.
- 6. При наявності захворювань хрящів (хвороба Осгуда-Шляттера). У разі хронічної нестабільності суглоба.



ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

- 1. Післяопераційні шви у зоні застосування.
- 2. Захворювання шкіри.
- 3. Алергічні реакції на компоненти, з яких виготовлений бандаж.

СПОСІБ ФІКСАЦІЇ

Бандаж фіксується на коліні за допомогою ремінця на липучці. Також завдяки ремінцю з липучкою регулюється рівень натягу.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Модель:	OSD-ARK1055
Матеріал:	поліестер – 35 %; бавовна – 25 %; спонж – 40 %
Колір:	чорний
Ребра жорсткості:	3 модельовані шини
Ділянка колінної чашечки:	відкрита
Ступінь фіксації:	жорстка
Спосіб фіксації:	фіксується за рахунок шести ремінців з липучками
Висота, (см):	55
Розмірний ряд, (см):	універсальний
Країна реєстрації бренду:	Італія
Країна-виробник:	Турція

ОЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Очищення

З метою захисту бандажа від пошкоджень та забезпечення правильної експлуатації виробу необхідно виконувати наступні вимоги:

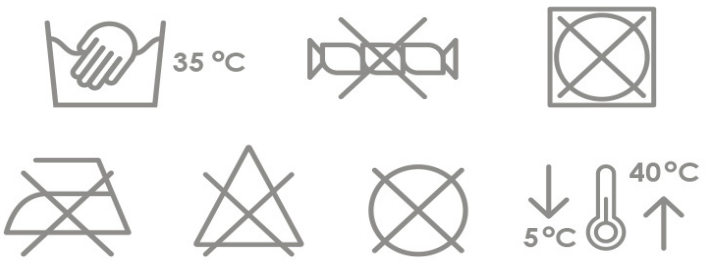

- 1. Прати м'якими миючими засобами за температури не вище +35 °C.
- 2. Під час прання та/або полоскання не терти і не викручувати.
- 3. Сушити далеко від джерел тепла.
- 4. Не прасувати.
- 5. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор).
- 6. Не піддавати сухому хімічному чищенню.
- 7. Зберігати у сухому місці за температури від + 5 °C до + 40 °C, далеко від джерел тепла, прямих сонячних променів і пилу.



Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будь-які характеристики, зазначені у цій Інструкції. Усі дані, зазначені в Інструкції, наведені для ознайомлення.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

- 1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- 2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- 3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- 4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____ Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «OSD-ARK1055» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

Виробник: Company Hegeli Ortopedik Urunler SAN. ve TIC. LTD. STI. / Компанія Хегелі Ортопедік Урунлер САН. ве ТІС. ЛТД. СТІ. Cihangir Mah. Sehîr Piyade Er Yavuz Bahar Sok. No:4 Ambarlı Avcılar/ Istanbul/Turkey / Сіхангір Мах. Сехіт Піяде Ер Йавуз Бахар Сок. №:4 Амбарлі Авсілар/Істанбул/Туреччина.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський, 100/2.

Номер редакції: № 3 від 29.10.2021.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Термін придатності виробу: див. на маркуванні.

Гарантійний термін на виріб «OSD-ARK1055» – 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

