

# Тутор колінного суглоба

## Інструкція

### OSD-ARK1065



#### Показання до застосування:

У період реабілітації після операцій на коліні, у разі вивихів та крововиливів у м'язах, при переломі та інших травмах коліна, для повної іммобілізації колінного суглоба (використовується за призначенням лікаря у якості альтернативи гіпсу), для профілактики розвитку захворювань суглобів, зокрема, артрозу, при наявності захворювань хрящів (хвороба Осгуда-Шляттера), у разі хронічної нестабільності суглоба.

#### Протипоказання до застосування:

Післяопераційні шви в області застосування, захворювання шкіри, алергічні реакції на компоненти, з яких виготовлений бандаж.

#### Догляд

З метою захисту бандажа від пошкоджень і забезпечення правильної експлуатації виробу необхідно виконувати наступні вимоги: прати м'якими миючими засобами за температури не вище +35 °С, під час прання та/або полоскання не терти і не викручувати, сушити далеко від джерел тепла, не прасувати, не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор), не піддавати сухому хімічному чищенню, зберігати у сухому місці за температури від + 5 °С до + 40 °С, далеко від джерел тепла, прямих сонячних променів і пилу.

**Гарантійний термін:** 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

Параметр	Значення
Модель:	OSD-ARK1065
Тип бандажа:	тутор колінного суглоба
Матеріал:	поліестер – 35 %, бавовна – 25 %, спонж – 40 %.
Колір:	чорний
Рейбра жорсткості:	3 модельовані шини
Розміри, (см):	універсальний



35 °C

