

# Тутор колінного суглоба

## Інструкція

### OSD-ARK1065

#### Показання до застосування:

У період реабілітації після операцій на коліні, у разі вивихів та крововиливів у м'язах, при переломі та інших травмах коліна, для повної іммобілізації колінного суглоба (використовується за призначенням лікаря у якості альтернативи гіпсу), для профілактики розвитку захворювань суглобів, зокрема, артрозу, при наявності захворювань хрящів (хвороба Осгуда-Шляттера), у разі хронічної нестабільності суглоба.

#### Протипоказання до застосування:

Післяопераційні шви в області застосування, захворювання шкіри, алергічні реакції на компоненти, з яких виготовлений бандаж.

#### Догляд

З метою захисту бандажа від пошкоджень і забезпечення правильної експлуатації виробу необхідно виконувати наступні вимоги: прати м'якими миючими засобами за температури не вище +35 °С, під час прання та/або полоскання не терти і не викручувати, сушити далеко від джерел тепла, не прасувати, не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор), не піддавати сухому хімічному чищенню, зберігати у сухому місці за температури від + 5 °С до + 40 °С, далеко від джерел тепла, прямих сонячних променів і пилу.




**Дата виготовлення:** 05. 2018.

**Гарантійний термін:** 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

| Параметр          | Значення                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Модель:           | OSD-ARK1065                                     |
| Тип бандажа:      | тутор колінного суглоба                         |
| Матеріал:         | поліестер – 35 %, бавовна – 25 %, спонж – 40 %. |
| Колір:            | чорний                                          |
| Рєбра жорсткості: | 3 модельовані шини                              |
| Розміри, (см):    | універсальний                                   |



35 °C

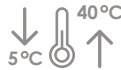

5°C

40°C