



## Бандаж на лікоть: 0065

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу. Збережіть її для отримання необхідної інформації у майбутньому.

### Показання до застосування:

1. У період реабілітації після операцій.
2. При бурситах (запальне захворювання слизових сумок навколо суглобів).
3. При переломах.
4. При вивихах або розривах зв'язок.
5. При хронічних захворюваннях опорно-рухового апарату, артритих, артрозах тощо.
6. Для профілактики захворювань, пов'язаних з пошкодженнями ліктьового суглоба.

### Протипоказання до застосування:

1. Післяопераційні шви в області застосування.
2. Захворювання шкіри.
3. Алергічні реакції на компоненти, з яких виготовлений бандаж.

### Технічні характеристики

Параметр:	Значення:
Модель:	0065
Тип бандажа:	бандаж на лікоть
Матеріал:	неопрен, бавовняне покриття, силікон
Колір:	чорний
Ступінь фіксації:	м'який
Розміри, (см):	S (22-25) M (25-28) L (28-31) XL (31-34) XXL (34-37)

### Догляд

З метою захисту бандажа від пошкоджень і забезпечення правильної експлуатації виробу необхідно виконувати наступні вимоги:

1. Прати м'якими миючими засобами за температури не вище +35° С.
2. Під час прання та/або полоскання не терти і не викручувати.
3. Сушити далеко від джерел тепла.
4. Не прасувати.
5. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор).
6. Не піддавати сухому хімічному чищенню.

**Виріб «0065»** відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.



**Виробник:** Anatomic Help S.A. / Анатомік Хелп С.А.

25th Km Thessaloniki-Kilkis, 611 00 N., Santa Greece / 25 Км Зессалонікі-Кілкис, 611 00 Н., Греція.

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

**Номер редакції:** № 7 від 13.06.2019.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

**Гарантійний термін:** 12 місяців з дати продажу за умов дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

