



Бандаж для плечового суглоба: 0284

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу. Збережіть її для отримання необхідної інформації у майбутньому.

Показання до застосування:

1. У період реабілітації після операцій.
2. При гіпермобільності (надзвичайній рухливості) плечових суглобів.
3. При переломах.
4. При вивихах або розривах зв'язок.
5. При хронічних захворюваннях опорно-рухового апарату, артритих, артрозах, остеоартрозах, періартритах, міозитах тощо.
6. При діагностиці парезу або паралічу руки.
7. Для профілактики захворювань, пов'язаних з пошкодженнями ліктьового суглоба, плеча та руки.

Протипоказання до застосування:


1. Післяопераційні шви в області застосування.
2. Захворювання шкіри.
3. Алергічні реакції на компоненти, з яких виготовлений бандаж.

Технічні характеристики

Параметр:	Значення:
Модель:	0284
Тип бандажа:	бандаж для плечового суглоба
Матеріал:	неопрен, бавовняне покриття
Спосіб фіксації:	ремінець з липучками
Ступінь фіксації:	середній
Колір:	синій
Розміри, (см):	S (24-28); M (28-32); L (32-38); XL (38-44).

Догляд

З метою захисту бандажа від пошкоджень і забезпечення правильної експлуатації виробу необхідно виконувати наступні вимоги:

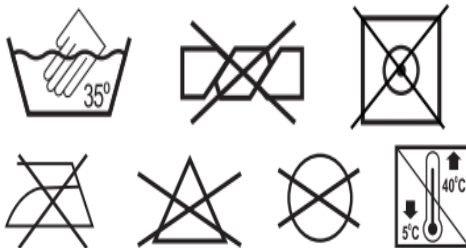

1. Прати м'якими миючими засобами за температури не вище +35° С.
2. Під час прання та/або полоскання не терти і не викручувати.
3. Сушити далеко від джерел тепла.
4. Не прасувати.
5. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор).
6. Не піддавати сухому хімічному чищенню.

Виріб «0284» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.



Виробник: Anatomic Help S.A. /
Анатомік Хелп С.А.

25th Km Thessaloniki-Kilkis, 611 00 N.,
Santa Greece / 25 Км Зессалонікі-Кілкис,
611 00 Н., Греція.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 7 від 19.06.2019.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін: 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

