



Ортез на променевозап'ястний суглоб: 0506 (R/L)

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу. Збережіть її для отримання необхідної інформації у майбутньому.

Показання до застосування:

1. У період реабілітації після операцій.
2. При постійній нестабільності суглоба з метою підтримки необхідної для комфортного переміщення рухливості.
3. При великих розривах зв'язок.
4. При хронічних захворюваннях опорно-рухового апарату, артритих, артрозах тощо.
5. Для профілактики захворювань, пов'язаних з пошкодженням променевозап'ястного суглоба.

Протипоказання до застосування:


1. Післяопераційні шви в області застосування.
2. Захворювання шкіри.
3. Алергічні реакції на компоненти, з яких виготовлений бандаж.

Технічні характеристики

Параметр:	Значення:
Модель:	0506 (R/L)
Тип бандажа:	ортез
Матеріал:	щільний трикотаж
Колір:	чорний
Ступінь фіксації:	жорсткий
Спосіб фіксації:	2 ремінця з липучками
Рембра жорсткості:	2 (метал) + 1 (пластмаса)
Розміри, (см):	S (10-13); M (14-17); L (18-22); XL (23-28).

Догляд

З метою захисту бандажа від пошкоджень і забезпечення правильної експлуатації виробу необхідно виконувати наступні вимоги:

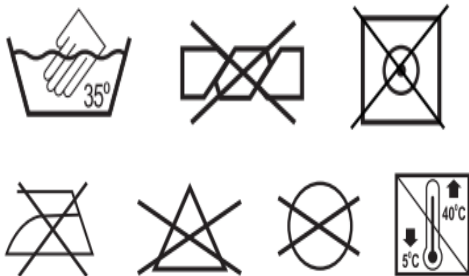

1. Прати м'якими миючими засобами за температури не вище +35° С.
2. Під час прання та/або полоскання не терти і не викручувати.
3. Сушити далеко від джерел тепла.
4. Не прасувати.
5. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор).
6. Не піддавати сухому хімічному чищенню.

Виріб «0506 (R/L)» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

Виробник: Anatomic Help S.A. / Анатомік Хелп С.А.

25th Km Thessaloniki-Kilkis, 611 00 N., Santa Greece / 25 Км Зесалонікі-Кілкис, 611 00 Н., Греція.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 7 від 19.06.2019.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін: 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

