



Бандаж-корсет для поперекового відділу хребта: 3154

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу. Збережіть її для отримання необхідної інформації у майбутньому.

Показання до застосування:

1. У період реабілітації після операцій.
2. Для підтримки та розвантаження черевної порожнини.
3. При кесаревому розтині, операціях на черевній порожнині, грижах живота й післяопераційних грижах, у разі опущення нирок та інших внутрішніх органів.
4. При ожирінні III-IV ступеня, коли необхідно компенсувати недостатню фіксацію м'язів передньої черевної стінки.
5. Для профілактики захворювань, пов'язаних з пошкодженнями попереково-крижового та брюшного відділів.

Протипоказання до застосування:


1. Післяопераційні шви в області застосування.
2. Захворювання шкіри.
3. Алергічні реакції на компоненти, з яких виготовлений бандаж.

Технічні характеристики

Параметр:	Значення:
Модель:	3154
Тип бандажа:	бандаж-корсет для поперекового відділу хребта
Матеріал:	тканий еластичний матеріал
Колір:	бежевий
Спосіб фіксації:	липучка
Висота, (см):	30
Ребра жорсткості:	4 (пластмаса)
Розміри, (см):	S (70-80); M (80-90); L (90-100); XL (100-110); XXL (110-120).

Догляд

З метою захисту бандажа від пошкоджень і забезпечення правильної експлуатації виробу необхідно виконувати наступні вимоги:

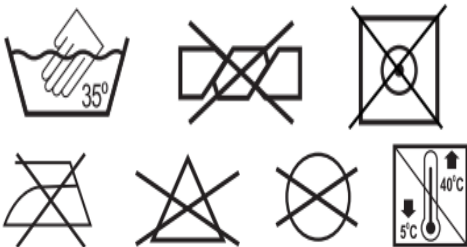

1. Прати м'якими миючими засобами за температури не вище +35° С.
2. Під час прання та/або полоскання не терти і не викручувати.
3. Сушити далеко від джерел тепла.
4. Не прасувати.
5. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор).
6. Не піддавати сухому хімічному чищенню.

Виріб «3154» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.



Виробник: Anatomic Help S.A. / Анатомік Хелп С.А.

25th Km Thessaloniki-Kilkis, 611 00 N.,
Santa Greece / 25 Км Зессалонікі-Кілкис, 611 00 Н., Греція.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»;
адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 7 від 20.06.2019.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін: 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

