

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу. Збережіть її для отримання необхідної інформації у майбутньому.

Показання до застосування:

1. У період реабілітації після операцій.
2. При переломах хребців у нижньому грудному й поперековому відділах.
3. При складних деформаціях хребта, остеопорозі, остеолізі, поперековому артрозі.
4. Консервативне лікування стабільних компресійних переломів тіл хребців (у тому числі остеопоротичних) у нижньому грудному і поперековому відділах хребта без неврологічних симптомів

Противоказання до застосування:


1. Післяопераційні шви в області застосування.
2. Захворювання шкіри.
3. Алергічні реакції на компоненти, з яких виготовлений бандаж.

Технічні характеристики

Параметр:	Значення:
Модель:	OSD-BODY-BRACE
Тип бандажа:	рамковий гіперекстензійний ортез
Матеріал:	алюміній; пластмаса
Колір:	сірий
Ребра жорсткості:	3 (алюміній)
Розміри, (см):	S (60–75/31–42) M (75–90/35–46) L (90–105/42–50) XL (105–120/42–50)


Догляд

З метою захисту бандажа від пошкоджень і забезпечення правильної експлуатації виробу необхідно виконувати наступні вимоги:

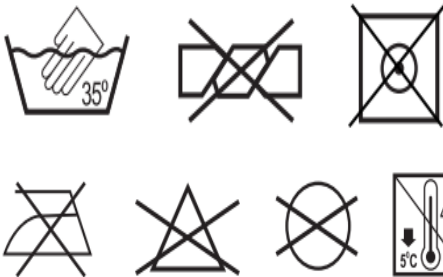

1. Прати м'якими миючими засобами за температури не вище +35° С.
2. Під час прання та/або полоскання не терти і не викручувати.
3. Сушити далеко від джерел тепла.
4. Не прасувати.
5. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор).
6. Не піддавати сухому хімічному чищенню.
7. Зберігати у сухому місці за температури від + 5 °С до + 40 °С, далеко від джерел тепла, прямих сонячних променів і пилу.

Рамковий гіперекстензійний ортез OSD-BODY-BRACE відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

 **Виробник:** Hong Ky Co., Ltd / Гонг Ки Ко., Лтд

D2 Street, Binh Chuan Manufacturing Zone, Thuan An, Binh Duong Province, Vietnam / Д2 Стреет, Бінг Чуан Мануфактурінг Зоне, Труан Ан, Бінг Дуонг Провінце, В'єтнам.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 6 від 24.04.2017.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін на **ортез OSD-BODY-BRACE** – 1 рік з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

