



## Шийний комір: 0402

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу. Збережіть її для отримання необхідної інформації у майбутньому.

### Показання до застосування:

- У період реабілітації після операцій на хребті в області шиї.
- Остеохондроз.
- Спазми шийних м'язів, що провокують сильні запаморочення та головний біль.
- Порушення постави.
- Кардіопатичний та кардіальний синдроми.
- Зсув або нестабільність хребців у шийному відділі.
- Реабілітація після механічних травм.
- Патологічна підвищена рухливість шиї.
- Компресія спинного мозку.
- Гіперзбудливість.
- Синдром короткої шиї.
- Рухові порушення.
- Родові травми шийного відділу хребта.
- Пригнічення нервової системи.
- Синдром хребетної артерії.

### Протипоказання до застосування:


- Післяопераційні шви в області застосування.
- Захворювання шкіри.
- Алергічні реакції на компоненти, з яких виготовлений бандаж.

### Технічні характеристики

Параметр:	Значення:
Модель:	0402
Тип бандажа:	шийний комір
Матеріал:	комір з поролона, чохол з бавовняної тканини
Колір:	бежевий
Способ фіксації:	застібки на «ліппучках»
Віймка під підборіддя:	так
Висота, (см):	10
Розміри, (см):	S (30-34); M (34-38); L (38-42); XL (42-46).

### Догляд

З метою захисту бандажа від пошкоджень і забезпечення правильної експлуатації виробу необхідно виконувати наступні вимоги:

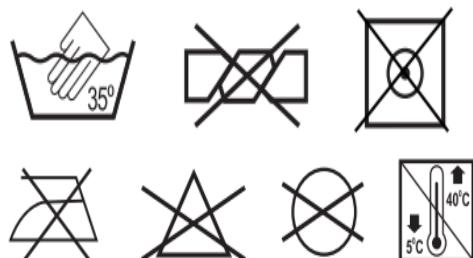

- Прати м'якими миючими засобами за температури не вище +35° С.
- Під час прання та/або полоскання не терти і не викручувати.
- Сушити далеко від джерел тепла.
- Не прасувати.
- Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор).
- Не піддавати сухому хімічному чищенню.

**Виріб «0402»** відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

**Виробник:** Anatomic Help S.A. / Анатомік Хелп С.А.

25th Km Thessaloniki-Kilkis, 611 00 N., Santa Greece / 25 Км Зессалонікі-Кілкіс, 611 00 Н., Греція.

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

**Номер редакції:** № 7 від 20.06.2019.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

**Гарантійний термін:** 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

