



Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу. Збережіть її для отримання необхідної інформації у майбутньому.

Показання до застосування:

1. У період реабілітації після операцій на хребті в області ший.
2. Остеохондроз.
3. Спазми шийних м'язів, що провокують сильні запаморочення та головний біль.
4. Порушення постави.
5. Кардіопатичний та кардіальний синдроми.
6. Зсув або нестабільність хребців у шийному відділі.
7. Реабілітація після механічних травм.
8. Патологічна підвищена рухливість ший.
9. Компресія спинного мозку.
10. Гіперзбудливість.
11. Синдром короткої ший.
12. Рухові порушення.
13. Родові травми шийного відділу хребта.
14. Пригнічення нервової системи.
15. Синдром хребетної артерії.

Протипоказання до застосування:


1. Післяопераційні шви в області застосування.
2. Захворювання шкіри.
3. Алергічні реакції на компоненти, з яких виготовлений бандаж.

Технічні характеристики

Параметр:	Значення:
Модель:	0404
Тип бандаж:	шийний комір
Матеріал:	гіпоалергенний поліетиленовий пінопласт з високою щільністю
Колір:	бежевий
Спосіб фіксації:	застібки на «ліппучках»
Виїмка під підборіддя:	так
Розміри, (см):	S (27-34); M (34-41); L (41-48).

Догляд

З метою захисту бандажу від пошкоджень і забезпечення правильної експлуатації виробу необхідно виконувати наступні вимоги:

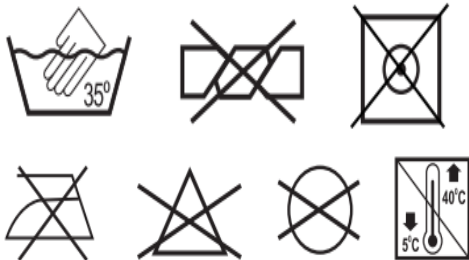

1. Прати м'якими миючими засобами за температури не вище +35° С.
2. Під час прання та/або полоскання не терти і не викручувати.
3. Сушити далеко від джерел тепла.
4. Не прасувати.
5. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор).
6. Не піддавати сухому хімічному чищенню.

Виріб «0404» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.



Виробник: Anatomic Help S.A. /
Анатомік Хелп С.А.

25th Km Thessaloniki-Kilkis, 611 00 N.,
Santa Greece / 25 Км Зессалонікі-Кілкис,
611 00 Н., Греція.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 7 від 20.06.2019.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін: 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

