



Пандус для інвалідного візка

OSD-BLR150

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС

ЗМІСТ

1.	Вступ.....	3
2.	Заходи безпеки	3
3.	Технічні характеристики.....	4
4.	Загальна характеристика.....	4
5.	Технічне обслуговування і догляд.....	4
6.	Належна утилізація продукту	5
7.	Відомості про сертифікацію.....	6
8.	Умови гарантії	7

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією та дотримуйтесь її під час використання виробу.



Не використовуйте пандус, не ознайомившись з Інструкцією.

Не використовуйте пандус у випадку його пошкодження.

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Пандус для інвалідного візка «OSD-BLR150» (далі за паспортом – пандус / виріб / пристрій / обладнання) – це похила поверхня, що дублює сходи, збудована на підставі ДБН В.2.2-9-99 для пересування осіб, які користуються колісними кріслами. Використовується на вулиці та у різних медичних установах.

Пандус для інвалідного візка «OSD-BLR150» розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.



Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будь-які технічні характеристики, зазначені у цій Інструкції. Усі дані, зазначені у Інструкції, наведені для ознайомлення.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

2. Заходи безпеки

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування пандуса за умов, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

1. Перед використанням **УВАЖНО** ознайомтеся з Інструкцією.
2. Перед кожним використанням **ПЕРЕВІРЯЙТЕ** загальний технічний стан виробу. Не використовуйте його у випадку виявлення пошкоджень.
3. Максимально допустиме навантаження на підйомник становить – 300 кг. **НІКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
4. Кожні два роки слід **ПРОВОДИТИ** повний кваліфікований технічний огляд пандусу.
5. Під час підйому / спуску пацієнта **УНИКАЙТЕ** різких рухів та розгойдування.
6. Під час підйому / спуску пацієнта **ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ** на те, щоб рухи його тіла не були обмежені.

3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-BLR150
Матеріал:	сталь
Розміри, Д x Ш, (см):	153 x 71
Вага, (кг):	13,34
Максимальне навантаження, (кг):	300
Гарантійний термін, (міс.):	12

4. Загальна характеристика



Перевіряйте справність пандуса перед кожним використанням, якщо виріб використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на шість місяців. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, не використовуйте виріб.

Особливості пандуса «OSD-BLR150»:

- ✓ Міцний складаний пандус для подолання пагорбів і сходинок, полегшує спуск інвалідного візка з автомобіля.
- ✓ Ребриста поверхня пандуса забезпечує плавний з'їзд і підйом, запобігає ковзанню.
- ✓ Обладнаний обмежувальними бортами по боках для безпечного з'їзду.
- ✓ Завдяки конструкції, що складається, за допомогою ручки виріб зручно переносити і транспортувати у машині.
- ✓ У складеному вигляді пандус не займає багато місця для зберігання.

5. Технічне обслуговування і догляд

За умов забруднення пристрою його поверхню можна обробляти неагресивними миючими та дезінфікуючими засобами, уникаючи рухливих частин та елементів. Щоразу перед початком

експлуатації слід візуально оглянути пристрій на наявність пошкоджень. У разі сумнівів не використовуйте пристрій і не намагайтеся полагодити самостійно. Зверніться до місцевого дилера або до місця придбання товару за подальшими інструкціями.

Зовнішню поверхню пандуса обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте пандус у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте ганчіркою після кожного використання.


ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції підйомника, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

¹ Цей прилад ТМ «OSD» виготовлено в умовах застосування системи суворого контролю якості.

² Пандус для інвалідного візка «OSD-BLR150» відповідає технічним умовам і визнаний придатним для експлуатації.

6. Належна утилізація продукту

Цей символ на приладі або в паспорті до нього вказує, що даний продукт не підлягає утилізації разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Для запобігання можливої шкоди для навколишнього середовища або здоров'я людини через неконтрольовану утилізацію відходів, будь ласка, відокремте цей прилад від інших типів відходів і утилізуйте його належним чином для раціонального повторного використання матеріальних ресурсів.

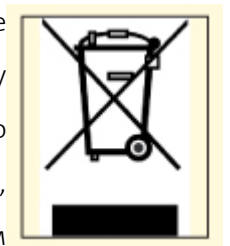

Даний продукт не містить ніяких шкідливих речовин.

7. Відомості про сертифікацію

Пандус для інвалідного візка «OSD-BLR150» відповідає технічним вимогам і визнаний придатними для експлуатації.



Виробник: Bliss Health Products Co.,Ltd / Блісс Хелс Продуктс Ко., Лтд.

96 Zhaoyi Rd., Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province,
P.R.C. / 96, Чжаої Рд, Донгшен Таун, Жонгшан Сіті, Гуангдонг Провінс, Китай.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 4 від 26.06.2019.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін на **пандус для інвалідного візка «OSD-BLR150»** – 1 рік з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.





8. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____