



## Дошка для пересаджування

OSD-TB1

### ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією. Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження. Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Дошка для пересаджування «OSD-TB1» (далі за паспортом – виріб / сидіння / виріб для пересаджування) – рекомендовано для застосування у медичних закладах та вдома.

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком використання виробу або під час використання після тривалого зберігання **ПЕРЕВІРТЕ** виріб **НА НАЯВНІСТЬ ТРИЩИН**. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан.

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- Максимально допустиме навантаження на виріб – 100 кг. **НИКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
- ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** його у випадку зносу або пошкодження.
- НЕОБХІДНО** періодично оглядати виріб на стійкість.
- КОРИСТУВАЧАМ** з обмеженими фізичними можливостями **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** звертатися за допомогою до асистента.
- У ВИПАДКУ** використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Модель:	OSD-TB1
Матеріал:	пластик

Колір:	білий
Довжина, (см):	70
Ширина, (см):	20
Висота, (см):	3
Максимальне навантаження, (кг):	100

### ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

- Виготовлена з міцного пластику білого кольору з ребристою поверхню.
- Забезпечує зручність, комфорт та безпеку під час пересаджування людини з обмеженою рухливістю з крісла колісного на ліжку, туалетний стілець чи іншу поверхню.
- Оснащена гумовими вставками, що запобігають ковзанню дошки по поверхні та забезпечують її надійну фіксацію.
- Легка та зручна при транспортуванні.

### ПОРЯДОК РОБОТИ

Для правильної експлуатації, будь ласка, ознайомтеся із малюнками.



Рис.1 Пересадка з ліжка на крісло-коляску або стілець самостійно.



Рис 2. Пересадка з ліжка на крісло-коляску або стілець за допомогою асистента.

### ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволенними в Україні для дезінфекції поверхонь, відповідно до чинних нормативних документів.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

**ПРИМІТКА:** Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



**Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням. У разі поломки або несправності, пошкодження або розривів НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.**

### УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонт виробу);
  - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія поширюється на виробничі та матеріальні дефекти, вона не розповсюджується на:
  - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.**

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_

### ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «OSD-TB1» відповідає технічним вимогам і визнано придатним для експлуатації.



Виробник: BLISS HEALTH PRODUCTS CO.,LTD / БЛИСС ХЕЛС ПРОДАКТС КО., ЛТД No.3 Zehe Street, Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China 528415 / №3, Зех Стріт, Тоншин Іст Роад, Юмін Ком'юніті, Сяолань Таун, Чжуншань Сіті, Гуандонг Провінс, Китай, 528415.

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ "ОСД Східна Європа". Адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2; Тел.: +38 (044) 232 44 51, e-mail: office@osd.com.ua

**Номер редакції:** № 2 від 20.11.2025.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

**Термін придатності виробу:** див. на маркуванні.

**Гарантійний термін на виріб «OSD-TB1»** – 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.