



**Крісло колісне**

**OSD-MOD-8B**

**Інструкція з експлуатації**



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.  
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



**Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС**

## ЗМІСТ

1. Вступ.....	3
2. Заходи безпеки .....	3
3. Технічні характеристики.....	4
4. Основні елементи крісла колісного .....	5
5. Загальні положення .....	6
5.1. Як розкласти коляску.....	6
5.2. Як скласти коляску .....	6
6. Керування гальмами.....	7
7. Використання .....	7
8. Усунення несправностей .....	7
9. Відомості про сертифікацію.....	8
10. Умови гарантії.....	9

## 1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією та дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте коляску, не ознайомившись з Інструкцією.**

**Не використовуйте коляску у випадку її пошкодження.**

**Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Крісло колісне «OSD-MOD-8B» (далі за паспортом – крісло колісне / крісло / виріб)– легке, складне транспортне крісло з рамою з м'якої сталі. Розраховано для використання всередині приміщень та на гладких зовнішніх поверхнях, таких як торговельні центри, аеропорти та асфальтовані майданчики. Розроблений для пересування супроводжувачим. Витримує користувачів вагою до 100 кг.

Параметри коляски:

- складана рама зі сталі;
- литі задні колеса, діаметром – 8 дюймів;
- литі передні колеса, діаметром – 6 дюймів;
- відкидна підніжка;
- відкидні поруччя;
- вага – 9,52 кг.

## 2. Заходи безпеки



**Недотримання інструкцій з експлуатації може призвести до пошкодження виробу, травмування користувача або небезпечних для життя ситуацій.**

**Важливо, щоб супроводжувачий або члени сім'ї були ознайомлені з належними процедурами допомоги під час користування кріслом колісним.**

Перед початком використання коляски або під час використання після тривалого зберігання переконайтеся, що всі частини коляски закріплені та міцно зафіксовані. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан коляски: усі елементи з часом зношуються, особливо це стосується коліс, сидіння, підніжок та поруччя.

Уникайте калюж або інших вологих поверхонь. Наразі намокання коляски слід якомога скоріше її висушити.

Під час проїзду через перепони (крутий з'їзд чи підйом, сходи тощо) будьте уважні та обережні, переконайтеся, що немає ризиків зазначених вище.

1. Максимально допустиме навантаження на коляску – 100 кг. **НІКОЛИ НЕ ПЕРЕВИЦЬУЙТЕ ДОПУСТИМИЙ ЛІМІТ ВАГИ!**
2. **НІКОЛИ** не дозволяйте дітям керувати кріслом.
3. **НІКОЛИ** не ставайте на підніжку, оскільки це може призвести до перекидання виробу і падіння людини.
4. **НІКОЛИ** не робіть надмірних різких рухів або нахилів вперед.
5. **НІКОЛИ** не нахильтеся вперед під час їзди, оскільки це може вплинути на стабільність.
6. **БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ** під час підймання або пересування у вузьких або нерівних місцях.
7. **НІКОЛИ** не підіймайте коляску, тримаючи її за поруччя, підіймати слід за раму.
8. **БУДЬТЕ УВАЖНІ** під час розкладання коляски – остерігайтеся травмування пальців рук.
9. **НІКОЛИ** не використовуйте коляску на поверхнях, що рухаються або ескалаторі!
10. Кожні два роки слід проводити повний кваліфікований технічний огляд коляски.
11. Виготовлені з тканини частини коляски (сидіння та спинка) потрібно прати в міру забруднення (попередньо їх слід зняти, відкрутивши гвинти на колясці). Для чистки інших частин застосовуйте тканину, змочену розведеним нейтральним мийним засобом. миючий засіб, теплу воду та губку. Вологою тканиною протріть виріб та негайно насухо витріть.
12. За потреби сидіння крісла колісного слід дезінфікувати відповідним дезінфікуючим розчином.
13. Нанесіть відповідне мастило на часто рухомі деталі. За потреби замініть деталі.
14. **РЕГУЛЯРНО** оглядайте гальмівний механізм. На ефективність гальмування може впливати потрапляння бруду чи сторонніх предметів до рухомих частин коляски.
15. Якщо виявлено несправність, то **НЕ ПРОВОДЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
16. Крісло колісне необхідно зберігати в сухому та провітрюваному місці.
17. Переконайтеся, що виріб належним чином складений або закріплений під час транспортування.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування крісла колісного за умов, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

### 3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-MOD-8B
Колір рами:	червоний
Матеріал:	сталь
Матеріал сидіння та спинки:	нейлон

Загальна ширина, (см):	52,5
Загальна висота, (см):	89,5
Загальна глибина, (см):	78
Розміри в складеному вигляді, Д x Ш x В, (см):	52,5 x 25 x 73
Ширина сидіння, (см):	43
Глибина сидіння, (см):	39
Висота сидіння від підлоги, (см):	49
Передні колеса, (дюйм):	6
Задні колеса, (дюйм):	8
Вага, (кг):	9,52
Максимальне навантаження, (кг):	100

#### 4. Основні елементи крісла колісного



Рис. 1

## 5. Загальні положення

### 5.1. Як розкласти коляску

#### Крок 1: Відпустіть фіксатор (рис. 2)

- Обережно поставте складене крісло колісне у вертикальне положення на рівну поверхню.
- Знайдіть червоний запобіжний затискач, прикріплений до рами.
- Відпустіть затискач, щоб розкласти крісло колісне.



Рис. 2

#### Крок 2: Почніть розгортати каркас (рис. 3)

- Тримаючись за ручку для штовхання та за трубчасті опори рами сидіння, плавно й обережно розведіть їх у різні боки. Рама почне розкриватися.
- Переконайтеся, що передні та задні колеса стали у робоче положення

**ПРИМІТКА:** Переконайтеся, що ваші пальці не знаходяться між металевими частинами рами.



Рис. 3

#### Крок 3: Зафіксуйте фіксатор у відкритому положенні (рис. 4)

- Після того, як крісло колісне повністю розкладено, а рама сидіння притиснута, вставте червоний фіксатор у призначений фіксуєчий виїм на розкладеній рамі. Це гарантує, що рама залишиться жорсткою та випадково не складеться під час використання.



Рис. 4

### 5.2. Як скласти коляску

- Підніміть підставку для ніг та підлокітники.
- Відкрийте обидва замки фіксатора збоку крісла.
- Обережно тримайте каркас рами сидіння однією рукою та каркас спинки іншою рукою, потягніть, як показано на малюнку (рис. 5).

**ПРИМІТКА:** Переконайтеся, що ваші руки розташовані таким чином, щоб уникнути травмування.

- Після повного складання крісла колісного заблокуйте фіксатором з одного боку, щоб він залишався жорстким і не відчинявся.



Рис. 5

## 6. Керування гальмами

- Ручні гальма розташовані на ручках для керування асистентом.
- Щоб загальмувати крісло колісне, спочатку потягніть за гальмівні важелі на задній частині крісла, а потім посуньте його вгору, доки не почуєте клацання, яке свідчить про увімкнення гальма.
- Щоб відпустити гальмо, натисніть чорний ковпачок фіксатора гальма, доки не почуєте ще одне клацання, і крісло колісне зможе вільно рухатися.



Рис. 6

## 7. Використання

Правильний розподіл ваги тіла у колясці є запорукою легкого керування. Чим ближче центр ваги до задніх коліс, тим легше керувати коляскою. Значний вплив мають:

- будова тіла,
- постава,
- положення на сидінні.

## 8. Усунення несправностей

*Якщо під час руху коляска нахилиється в бік, то необхідно:*

- перевірити налаштування осей задніх коліс;
- переконатися, що користувач рівномірно розташований в колясці і немає переважування на один бік.

*Якщо коляска переміщується з надмірним навантаженням, то необхідно:*

- перевірити налаштування осей задніх коліс;
- перевірити осі передніх коліс на відсутність забруднення та сторонніх предметів;
- перевірити чи не відбулося перенесення центру ваги вперед.

*Якщо виникають труднощі під час повороту коляски, то необхідно:*

- переконатися, що осі та напрямні передніх коліс вільні від сторонніх предметів;
- перевірити фіксацію кріплень передніх коліс (чи вони не перетягнуті).

*Якщо гальма погано тримаються, то необхідно:*

- переконатися, що відстань між гальмами та колесом правильно відрегульована.

*Якщо коляска нестійка, то необхідно:*

- перевірити надійність фіксації кріплень в усіх елементах коляски.

Вищезазначені проблеми можуть виникнути внаслідок невірного налаштування коляски! Якщо жодна інструкція з усунення проблеми не допомогла, зверніться до вашого дилера.

## 9. Відомості про сертифікацію

Виріб «OSD-MOD-8B» відповідає технічним вимогам і визнана придатною для експлуатації.



**Виробник:** BLISS HEALTH PRODUCTS CO., LTD / БЛИСС ХЕЛС ПРОДАКТС КО., ЛТД. No.3 Zehe Street, Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, 528415, People's Republic of China / №3, Зех Стріт, Тоншин Іст Род, Юмін Ком'юніті, Сяолань Таун, Чжуншань Сіті, Гуандонг Провінс, 528415, Китайська Народна Республіка.



**Уповноважений представник виробника:** ТОВ "ОСД Східна Європа". Адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2 ; Тел.: +38 (044) 232-44-51, e-mail: office@osd.com.ua

**Номер редакції:** № 3 від 06.01.2026.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

Гарантійний термін на **виріб «OSD-MOD-8B»** – 12 місяців з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.



## 10. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
  - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

***УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.***

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_