



**Транзитна складана каталка**

**OSD-STT-\*\* / OSD-MOD-STT-\*\***

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.  
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



**Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС**

## ЗМІСТ

1. Вступ.....	3
2. Заходи безпеки.....	3
3. Технічні характеристики .....	4
4. Загальні положення .....	5
5. Використання.....	5
6. Усунення несправностей .....	6
7. Відомості про сертифікацію.....	6
8. Умови гарантії.....	7

## 1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією та дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте каталку, не ознайомившись з Інструкцією.**

**Не використовуйте каталку у випадку її пошкодження.**

**Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Каталка «OSD-STT-\*/ OSD-MOD-STT-\*/» розроблена для максимальної зручності та безпеки користувача.

Розрахована для використання на вулиці та в житлових приміщеннях.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 94/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

Параметри каталки:

- литі задні колеса, діаметром – 12 дюймів;
- литі передні колеса, діаметром – 8 дюйми;
- змінно-відкидні підніжки;
- відкидні поруччя;
- вага – 9,5 кг.

## 2. Заходи безпеки

Перед початком використання каталки або під час використання після тривалого зберігання переконайтеся, що всі частини каталки закріплені та міцно зафіксовані. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан каталки: усі елементи з часом зношуються, особливо це стосується коліс, сидіння, підніжок та поруччя.

Уникайте калюж або інших вологих поверхонь. Наразі намокання каталки слід якомога скоріше її висушити.

Під час проїзду через перепони (крутий з'їзд чи підйом, сходи тощо) будьте уважні та обережні, переконайтеся, що немає ризиків зазначених вище.

1. Максимально допустиме навантаження на каталку – 120 кг. **НІКОЛИ НЕ ПЕРЕВИЦЬУЙТЕ ДОПУСТИМИЙ ЛІМІТ ВАГИ!**
2. Не підіймайте каталку, тримаючи її за поруччя підіймати слід за раму.
3. Будьте уважні під час розкладання каталки – остерігайтеся травмування пальців рук.

4. НІКОЛИ не використовуйте каталку на поверхнях, що рухаються або ескалаторі!
5. Кожні два роки слід проводити повний кваліфікований технічний огляд каталки.
6. Виготовлені з тканини частини каталки (сидіння та спинка) потрібно прати в міру забруднення (попередньо їх слід зняти, відкрутивши гвинти на колясці). Для чистки м'яких частин застосовуйте миючий засіб, теплу воду та губку. Насухо витріть.
7. Регулярно оглядайте гальмівний механізм. На ефективність гальмування може впливати потрапляння бруду чи сторонніх предметів до рухомих частин каталки.
8. Якщо виявлено несправність, то НЕ ПРОВОДЬТЕ ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.


ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування інвалідного візка за умов, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

### 3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-STT-** / OSD-MOD-STT-**
Колір:	темно-синій
Матеріал:	сталь
Матеріал сидіння та спинки:	щільна тканина з поролоновою вставкою
Загальна ширина, (см):	56,5
Загальна висота, (см):	86
Ширина в складеному вигляді, (см):	22
Ширина сидіння, (см):	40; 45; 50
Глибина сидіння, (см):	40
Висота спинки, (см):	44
Висота сидіння від підлоги, (см):	42

Передні колеса, (дюйм):	8"
Задні колеса, (дюйм):	12"
Вага, (кг):	9,5
Максимальне навантаження, (кг):	120


#### 4. Загальні положення

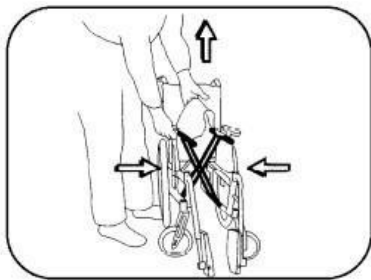

##### Як скласти каталку (рис. 1):

1. Підійміть підніжки.
2. Потягніть за сидіння, як показано на малюнку.
3. Покладіть свої руки таким чином, щоб уникнути травмування.

Рис. 1

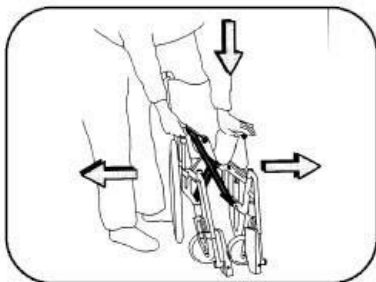

##### Як розкласти каталку (рис. 2):

1. Розведіть трубчасті опори сидіння, як показано на малюнку.

**ПРИМІТКА:** Переконайтеся, що ваші пальці не знаходяться між металевими частинами рами.

Рис. 2

#### 5. Використання

Правильний розподіл ваги тіла у колясці є запорукою легкого керування. Чим ближче центр ваги до задніх коліс, тим легше керувати каталкою. Значний вплив мають:

- будова тіла,
- постава,
- положення на сидінні.

## 6. Усунення несправностей

Якщо під час руху каталка нахиляється в бік, то необхідно:

- перевірити налаштування осей задніх коліс;
- переконатися, що користувач рівномірно розташований в колясці і немає переважування на один бік.

Якщо каталка переміщується з надмірним навантаженням, то необхідно:

- перевірити налаштування осей задніх коліс;
- перевірити осі передніх коліс на відсутність забруднення та сторонніх предметів;
- перевірити чи не відбулося перенесення центру ваги вперед.

Якщо виникають труднощі під час повороту каталки, то необхідно:

- переконатися, що осі та напрямні передніх коліс вільні від сторонніх предметів;
- перевірити фіксацію кріплень передніх коліс (чи вони не перетягнуті).

Якщо гальма погано тримаються, то необхідно:

- переконатися, що відстань між гальмами та колесом правильно відрегульована.

Якщо каталка нестійка, то необхідно:

- перевірити надійність фіксації кріплень в усіх елементах каталки.

Вищезазначені проблеми можуть виникнути внаслідок невірного налаштування каталки! Якщо жодна інструкція з усунення проблеми не допомогла, зверніться до вашого дилера.

## 7. Відомості про сертифікацію

Виріб «OSD-STT-\*\* / OSD-MOD-STT-\*\*» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.



**Виробник:** Zhenjiang Assure Medical Equipment Co., Ltd /

Чженьцзян Ешье Медікал Еквіпмент Ко., Лтд

No.297, Chuqiao road, Zhenjiang City, Jiangsu Province, China /

№297, Чуцяо Роад, Чженьцзян Сіті, Цзянсу Провінс, Китай.

**Уповноважений представник виробника:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2. Тел.: +38 (044) 232-44-51, e-mail: office@osd.com.ua

**Номер редакції:** № 5 від 09.08.2024.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

**Термін придатності виробу:** див. на маркованні.

Гарантійний термін на виріб «OSD-STT-\*\* / OSD-MOD-STT-\*\*» – 12 місяців з дати продажу за умови виконання вимог інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотна доставка здійснюється за рахунок клієнта.





## 8. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
  - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

*УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.*

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_