



Масажний стіл на 2 секції

SMT-AT025

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.

Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтеся її під час використання.

ЗМІСТ

1. Вступ.....	3
2. Заходи безпеки.....	3
3. Опис.....	4
4. Технічні характеристики.....	6
5. Аксесуари.....	6
6. Матеріали.....	6
7. Призначення.....	7
8. Технічне обслуговування і догляд.....	7
9. Рекомендації по догляду за столом.....	7
10. Рекомендації по догляду за поверхнею стола.....	8
11. Належна утилізація продукту.....	8
12. Відомості про сертифікацію.....	8
13. Умови гарантії.....	9

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу. Збережіть її для отримання необхідної інформації у майбутньому.



Не використовуйте масажний стіл, не ознайомившись з Інструкцією.

Не використовуйте масажний стіл у випадку його пошкодження.

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Масажний стіл «SMT-AT025» (далі за паспортом – масажний стіл/ стіл для масажу / стіл / виріб) - це спеціалізована кушетка, що застосовується для проведення масажу, мануальної терапії і косметичних процедур.

Розрахований для використання у спортивних центрах, SPA-салонах та медичних установах.

Масажний стіл «SMT-AT025» розроблений для максимальної зручності та безпеки користувача.

2. Заходи безпеки

Перед початком використання масажного столу або під час використання після тривалого зберігання переконайтеся, що всі частини знаходяться у належному стані. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан виробу.

1. Проводьте ЩОДЕННИЙ огляд виробу на наявність будь-яких недоліків.
2. РЕГУЛЯРНО перевіряйте цілісність усього комплекту.
3. Використовувати масажний стіл НЕОБХІДНО з аксесуарами, що входять у комплект.
4. ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИСТРОЇВ МОЖЕ ПОШКОДИТИ ВИРІБ.
5. НЕ ПЕРЕВИЩУЙТЕ вказану максимальну вагу!
6. ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що всі чотири ніжки знаходяться на твердій поверхні та на одному рівні під час використання столу.
7. При митті матеріалу із ПВХ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ засоби для чищення на спиртовій основі, це може спричинити пошкодження поверхні. Використовуйте теплий мильний розчин і витирайте насухо.

8. НЕ ТРИМАЙТЕ виріб поруч з інтенсивним джерелом тепла (висока температура, прямі сонячні промені, відкрите полум'я).
9. Виріб ПОТРІБНО ЗБЕРІГАТИ у сухому, добре вентиляваному та прохолодному місці.
10. ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ на дату виготовлення. За умов правильного використання та належного технічного обслуговування тривалість експлуатації даного виробу складає 3 роки.
11. Здійснюйте РЕГУЛЯРНИЙ огляд кожні 6 місяців.
12. Стіл ПОВИННЕН БУТИ цілим, не подряпанним та чистим.



Перевіряйте справність виробу перед кожним використанням, якщо прилад використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкодженнь або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування масажного столу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

3. Опис

Професійний масажний стіл призначений для проведення сеансів масажу і косметичних процедур, який використовують в спортивних центрах, SPA-салонах та в медичних установах.

Стіл для масажу міцний і стійкий із закругленими кутами, оббивний матеріал зроблений із ПВХ. Передбачений отвір для обличчя. Ніжки столу легко регулюються по висоті, а їх подвійні ручки блокування забезпечують додаткову безпеку.

Стіл простий в експлуатації та догляді, він легко складається і транспортується до місця проведення сеансу.

Масажний стіл здатний витримати статичне навантаження до 1250 кг завдяки міцній каркасній конструкції з алюмінію.



УВАГА



Зображення є орієнтовними. Тому, можуть відрізнятися від оригінального продукту.

4. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	SMT-AT025
Кількість секцій:	2
Довжина , (см):	186
Ширина, (см):	71
Висота, (см):	62-86
Матеріал покриття:	ПВХ
Матеріал наповнювача:	поролон високої щільності
Каркасна конструкція:	алюміній
Подушка:	багатошарова система Soft Foam
Макс.робоче навантаження, (кг):	250
Статична вага, (кг):	1250
Вага нетто, (кг):	14
Вага брутто, (кг):	17
Розмір коробки, (см):	95x 20.5 x 74
Гарантійний термін, (міс.):	12

5. Аксесуари

1. Подушка для обличчя.
2. Алюмінієвий каркас підголівника.
3. Полиця для рук.
4. Сумка для зберігання.

6. Матеріали

Покриття столу - екошкіра, суперм'яка поліуретанова штучна шкіра, забезпечує міцність і гігієнічність, завдяки чому прибирання і чищення значно полегшує процес.

В якості наповнювача багатошаровим поролоном застосовано унікальну систему мультищільності.

7. Призначення

Стіл масажний підходить для:

- усіх масажних прийомів;
- мануальної терапії;
- SPA-процедур;
- лімфодренажних процедур;
- рефлексотерапії

8. Технічне обслуговування і догляд

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку. Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та м'яких засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується нерегулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів однієї або декількох деталей, **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб.


9. Рекомендації по догляду за столом

1. Не піддавайте стіл впливу екстремальних температур. Висока температура може пошкодити оббивку масажного столу. Не рекомендується піддавати тканину оббивки столу впливу негативних температур або нагрівання вище 35°C.
2. Не слід зберігати переносний масажний стіл в автомобілі. Це одна з найпоширеніших причин впливу екстремальних температур. Завжди заносьте його в приміщення з невеликими перепадами вологості. Якщо до стола додається сумка для перенесення, завжди використовуйте її при транспортуванні виробу.
3. Розкладайте стіл безпосередньо перед роботою та прибирайте після сеансу масажу. Це захистить стіл від випадкових пошкоджень.
4. Використовуйте одноразові чи багаторазові простирадла для покриття масажного столу. Оскільки це відповідає санітарним нормам. Також простирадла можуть слугувати додатковим захистом від масажних олій та лосьйонів, що руйнують покриття.

10. Рекомендації по догляду за поверхнею стола

1. Поверхню масажного столу слід обробляти чистою водою перед початком процесу очищення та після нього. Необхідно дати оббивці висохнути перед тим, як знову використовувати стіл або перед тим, як прибрати його для зберігання.
2. Щодня видаляйте забруднення за допомогою ганчірки, змоченої у слабкому мильному розчині, після чого протріть стіл чистою вологою ганчіркою, щоб видалити залишки мила. Продезінфікуйте за допомогою спеціалізованих засобів для обробки шкірозамінника.
3. Не рекомендується застосовувати очисні засоби на основі цитрусових або розчинники та абразивні препарати, такі як спирт, ацетон та відбілювачі, а також інші продукти, що містять високі концентрації цих речовин. Ці засоби можуть пошкодити поверхню оббивного матеріалу.

11. Належна утилізація продукту

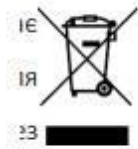

Цей символ на приладі або у паспорті до нього вказує, що даний продукт не підлягає утилізації разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Для запобігання можливої шкоди для навколишнього середовища або здоров'я людини через неконтрольовану утилізацію відходів, будь ласка, відокремте цей прилад від інших типів відходів і утилізуйте його належним чином для раціонального повторного використання матеріальних ресурсів. Цей продукт не містить ніяких шкідливих речовин.

12. Відомості про сертифікацію

Масажний стіл "SMT – AT025" відповідає технічним вимогам і визнано придатним для експлуатації.



Виробник: Anhui Sunny International Co.,Ltd/ Аньхой Санні

Інтернешнл Со., ООО Room 18F, Block E, CBD Office Building, NO. 5062

Huizhou Avenue, Hefei, Anhui, China/ Каб.18F, Блок Е, CBD Офіс Білдинг, NO. 5062 Хуей

Чжоу Авеню, Аньхой, Китай.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»;

адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський, 100/2.

Тел.: +38 (044) 232 44 51, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: № 2 від 18.10.2023.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін на масажний стіл "SMT – AT025" - 12 місяців з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.



13. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

1. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
2. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
3. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____