



# Матрац для функціонального ліжка «POLYPLOT»: P102MPLPMH120

## Інструкція

### ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.  
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.  
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Матрац для функціонального ліжка «P102MPLPMH120» (далі за паспортом – виріб / матрац) – розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПРОВІДЬТЕ** щоденний огляд матрацу на наявність ознак пошкодження.
- ПЕРІОДИЧНО** перевіряйте чохол матрацу на наявність будь-яких недоліків.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** чохол, якщо матрац вологий або погано висушений.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** миючі засоби, що містять хлор або розчинники. Це може пошкодити чохол та матрац. Проте, якщо використання продуктів, що містять хлор – необхідно, **РЕКОМЕНДУЄМО** використовувати слабкий розчин хлору та ретельно промити поверхню водою.
- ПІД ЧАС** прання чохла **ОБОВ'ЯЗКОВО** використовуйте разом з матрацом інший чохол.
- СТЕРИЛІЗАЦІЯ** матрацу або чохла (якщо необхідно) **ПОВИННА** проводитись за допомогою м'яких миючих засобів. Але **ІСНУЄ** **ЙМОВІРНІСТЬ** пошкодити матрац або чохол.
- НЕ ТРИМАЙТЕ** виріб поруч з інтенсивним джерелом тепла (висока температура, прямі сонячні промені, відкрите полум'я, цигарки, попільнички тощо).
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ** попаданню на виріб маслянистих або жирних речовин. Це може порушити структуру матеріалу покриття матраца.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Модель:	P102MPLPMH120
Матеріал матрацу:	піна з густиною 40 кг/м <sup>3</sup>
Матеріал чохла:	технологія POLYMAILLE®: покриття з поліуретану на трикотаж
Розмір матраца, Д x Ш x В, (см):	200 x 120 x 14
Розмір ліжка для матрацу, Д x Ш, (см):	200 x 120
Висота, (см):	14
Мінімальне навантаження, (кг):	135
Максимальне навантаження, (кг):	270

### ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

#### Догляд за матрацом



- Промийте під прозорою водою (не занурюйте матрац повністю у воду).
- Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор).
- Сушити далеко від джерел тепла.
- Не прасувати.
- Не піддавати сухому хімічному чищенню.

#### Догляд за чохлам



- Прати м'якими миючими засобами за температури не вище +95° С.
- Максимально дозволена концентрація хлору <1000 проміле (у цьому випадку промивання чистою водою обов'язкове).
- Сушка при помірній температурі.
- Не прасувати.
- Не використовуйте абразивні матеріали. Не піддавати сухому хімічному чищенню.

**ПРИМІТКА:** Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

### УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 24 місяці з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
  - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА:** Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_

### ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

**Виріб «P102MPLPMH120»** відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

**Виробник:** System Assistance Medical SAS / Систем Ассистенс Медікал САС.  
ZAE Casseneuil Road - LE LEDAT, 47300 Villeneuve sur Lot - FRANCE / ЗАЕ Кассней Роад – ЛЕ ЛЕДАТ, 47300 Вільнев сюр Лот – ФРАНЦІЯ.

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

**Номер редакції:** № 4 від 08.06.2021.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

Гарантійний термін на **виріб «P102MPLPMH120»** – 2 роки з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.

