



Матрац для функціонального ліжка «POLYLOT»: P102MPLPMH1

Інструкція

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтесь внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Матрац для функціонального ліжка «P102MPLPMH1» (далі за паспортом – виріб / матрац) – розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

Рекомендується використовувати для людей із середнім і високим ризиком виникнення пролежнів за шкалою Брадена/Нортон, а також у разі наявності пролежнів I та II ступеня (згідно з EPUAP).

Матрац цільноформований, виготовлений із монолітного блоку піни щільністю 40 кг/м³. Верхній шар матраца розділений на секції для забезпечення циркуляції повітря та зменшення тиску на зони ризику. Закруглені кути матраца дозволяють зручно встановити штативи для крапельниці в основі ліжка.

У комплект входить чохол з гіпоалергенним поліуретановим покриттям, яке має антибактеріальні, антимікробні та протигрибкові властивості, та нековзною основою. Чохол оснащений застібкою-блискавкою з трьох боків.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПРОВІДЬТЕ** щоденний огляд матрацу на наявність ознак перфорації.
- ПЕРІОДИЧНО** перевіряйте чохол матрацу на наявність будь-яких недоліків.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** чохол, якщо матрац вологий або погано висушений.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** миючі засоби, що містять хлор або розчинники. Це може пошкодити чохол та матрац. Проте, якщо використання продуктів, що містять хлор – необхідно, **РЕКОМЕНДУЄМО** використовувати слабкий розчин хлору та ретельно промити поверхню водою.
- ПІД ЧАС** прання чохла **ОБОВ'ЯЗКОВО** використовуйте разом з матрацом інший чохол.
- СТЕРИЛІЗАЦІЯ** матрацу або чохла (якщо необхідно) **ПОВИННА** проводитись за допомогою м'яких миючих засобів. Але **ІСНУЄ** ймовірність пошкодити матрац або чохол.
- НЕ ТРИМАЙТЕ** виріб поруч з інтенсивним джерелом тепла (висока температура, прямі сонячні промені, відкрите полум'я, цигарки, опалювальники тощо).
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ** попаданню на виріб маслянистих або жирних речовин. Це може порушити структуру матеріалу покриття матраца.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Модель:	P102MPLPMH1
Матеріал матрацу:	піна з густиною 40 кг/м³
Матеріал чохла:	технологія POLYMAILLE®: покриття з поліуретану на трикотаж
Розмір матраца, Д x Ш x В, (см):	198 x 87 x 14
Розмір ліжка для матрацу, Д x Ш, (см):	200 x 90
Мінімальне навантаження, (кг):	35
Максимальне навантаження, (кг):	130
Комплектація:	матрац, чохол із застібкою-блискавкою з 3 сторін
Країна виробник:	Франція
Гарантійний термін:	24 місяці

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Догляд за матрацом



- Промийте під прозорою водою (не занурюйте матрац повністю у воду).
- Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор).
- Сушити далеко від джерел тепла.
- Не прасувати.
- Не піддавати сухому хімічному чищенню.

Догляд за чохлом



- Прати м'якими миючими засобами за температури не вище +95°C.
- Максимально дозволена концентрація хлору <1000 проміле (у цьому випадку промивання чистою водою обов'язкове).
- Сушка при помірній температурі.
- Не прасувати.
- Не використовуйте абразивні матеріали. Не піддавати сухому хімічному чищенню.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 24 місяці з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонт виробу);
 - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
 - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____ Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «P102MPLPMH1» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

Виробник: System Assistance Medical SAS / Cistem Acciencs Medical SAS.
ZAE Casseneuil Road - LE LEDAT, 47300 Villeneuve sur Lot - FRANCE / ZAE Кассней Роад – ЛЕ ЛЕДАТ, 47300 Вільнев сюр Лот – ФРАНЦІЯ.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа». Адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2 ; Тел.: +38 (044) 232 44 51, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: № 6 від 08.08.2025.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін на **виріб «P102MPLPMH1»** – 24 місяці з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.
Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.

