



Медичне ліжко

OSD-9550

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС

ЗМІСТ

1.	Вступ.....	3
2.	Заходи безпеки	3
3.	Загальні характеристики.....	4
4.	Технічні характеристики.....	5
5.	Використання	6
6.	Технічне обслуговування і догляд.....	10
7.	Усунення несправностей	11
8.	Належна утилізація продукту	11
9.	Символи та їх значення	12
10.	Відомості про сертифікацію	13
11.	Умови гарантії.....	14

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією та дотримуйтесь її під час використання виробу. Збережіть її для отримання необхідної інформації у майбутньому.



Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.

Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Медичне ліжко «OSD-9550» (далі за паспортом – функціональне ліжко / медичне ліжко / ліжко з електроприводом / ліжко / виріб) – це пристосування для інвалідів або людей похилого віку, які змушені тривалий час перебувати у постільному режимі.

Ліжко з електроприводом «OSD-9550» рекомендоване для застосування у медичних закладах та вдома людям, позбавленим можливості пересуватися самостійно та користувачам, яким потрібен постійний нагляд медперсоналу.

Ліжко «OSD-9550» розроблене для максимальної зручності та безпеки користувача.

2. Заходи безпеки

1. Перед початком використання ліжка або під час використання після тривалого зберігання **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані.
2. Електричні ліжка повинні **ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ** проінструктованими особами (персоналом).
3. До початку користування ліжком, асистент повинен **ПЕРЕКОНАТИСЯ** у тому, що ліжко не нанесе пацієнту ніякої шкоди.
4. Під час використання ліжка **СЛІДКУЙТЕ** за тим, щоб ніякі сторонні предмети, частини тіла чи одягу не потрапляли до механізму.
5. Ліжко **ПРАЦЮЄ** від мережі 220V.
6. **НЕ ПІДКЛЮЧАЙТЕ** ліжко до мережі з невідповідним вольтажем.
7. **ЗАБОРОНЕНО ВИКОРИСТОВУВАТИ** виріб пацієнтами молодше 12 років (дітьми).
8. **ЗАБОРОНЕНО ПЕРЕМІЩАТИ** ліжко без попереднього відключення від мережі.
9. **НЕ МОЖНА** одночасно застосовувати декілька функцій виробу.
10. **УНИКАЙТЕ** потрапляння рідин до електромотору.
11. Ремонт електричних частин виробу **ПОВИНЕН ПРОВОДИТИ** лише кваліфікований персонал із застосуванням оригінальних інструментів.

12. Електродвигун **ПРАЦЮЄ БЕЗПЕРЕБІЙНО** протягом 2 хвилин на разі відключення ліжка від електромережі, потім він **АВТОМАТИЧНО ВІДКЛЮЧИТЬСЯ**.
13. **НЕ СТВОРЮЙТЕ** перепони для роботи двигунів.
14. Користувачам, які тривалий час змушені перебувати у постільному режимі, **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** використовувати спеціальні протипролежневі матраци для профілактики та лікування пролежневих ран. Виробник ліжка **НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ** за виникнення у пацієнта пролежнів.
15. Регулярно **ПЕРЕВІРЯЙТЕ** загальний технічний стан , адже усі елементи з часом зношуються.
16. Якщо виявлено несправність, то **НЕ ПРОВОДЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
17. **БУДЬТЕ ОБАЧНІ** на нерівних поверхнях.
18. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб на сходах та ескалаторах.
19. Максимальне навантаження на ліжко – 380 кг. **НІКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!



На разі використання виробу різними пацієнтами рекомендується систематично ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути перехресних інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування ліжка, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

3. Загальні характеристики

- Багатофункціональне баріатричне чотирисекційне ліжко з електричним керуванням.
- Ложе ліжка розділене на 4 секції: підйомні секція для голови, дві для ніг і одна статична в області таза.
- Посилена металева рама дозволяє витримувати навантаження до 380 кг. Завдяки широкому ложу пацієнта легше перевертати.
- Регулювання ліжком відбувається за допомогою пульта керування. У разі відключення електроенергії передбачена функція повернення ліжка в початкове положення.
- Пульт керування змінює кут нахилу головної і ножної секцій залежно від потреб користувача: забезпечує підвищений комфорт у процесі реабілітації і полегшує догляд з боку асистента.
- Електричне регулювання ліжка дозволяє змінювати висоту від підлоги до ложа, що надає можливість користувачеві легше вставати, лягати і пересідати.
- Ліжко комплектується потрійними бічними поручнями. Регулювання висоти поручнів полегшує доступ до пацієнта і забезпечує додатковий захист.
- Ліжко має 4 подвійні колеса, що обертаються по осі з гальмами на кожному з них. Завдяки колесам ліжко можна переміщувати в приміщенні, а гальма фіксують ліжко на місці.

4. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-9550
Кількість секцій:	4
Привід:	електричний
Кут підйому головної секції:	70°
Кут підйому ножної секції:	30°
Загальна ширина, (см):	136
Загальна довжина, (см):	217
Загальна довжина (розширена), (см):	231
Ширина ложа, (см):	120
Довжина ложа, (см):	200
Довжина ложа (розширена), (см):	215
Висота спинок від ложа, (см):	62
Загальна висота ліжка від підлоги, (см):	від 90 до 130
Висота ложа від підлоги, (см):	від 30 до 70
Висота поручнів від ложа, (см):	52
Регулювання ліжка за висотою:	так

Функція «Тренделенбург» та «анти-Тренделенбург»:	так
Поруччя:	так (у комплекті)
Трапеція:	так (у комплекті)
Діаметр коліс, (дюйми):	3
Габаритні розміри, Д x Ш, (см):	217 x 136
Розмір ложа, Д x Ш, (см):	200 x 120
Вага користувача, (кг):	350
Максимальне навантаження на ліжко, (кг):	380

5. Використання

Підготовка до експлуатації

1. Розкрийте упаковку та перевірте належну комплектацію.
2. Для зручності доставки ліжко поставляється у розібраному вигляді. Відкриваючи упаковку з виробом, потрібно перевірити цілісність деталей та наявність документів. Збережіть документи для подальшого використання.
3. Основна конструкція ліжка не вимагає збірки.
4. Установіть та закріпіть головну секцію та частину, яка розташована у ногах на рамі ліжка.
5. Ліжко має бути встановлено на рівній поверхні без ухилів.
6. Місце для розміщення ліжка повинно виключати випадкові удари та поштовхи.
7. Ліжко потребує постійної дезінфекції: чистіть та дезінфікуйте ліжко перед кожним використанням (першим та повторними).
8. Колеса повинні бути заблокованими.
9. Джерело живлення повинно відповідати номінальному (230 В, 50 Гц).
10. Кабель живлення (головний кабель) потрібно приєднати та прокласти таким чином, щоб його пошкодження було виключено.
11. Обережно пересувajte ліжко, щоб не пошкодити шнур живлення, двигун та пульт керування.

12. Ніякі перешкоди (нічні столики, кабельні жолоби, стільці тощо) не повинні завадити регулюванню.
13. Переконайтеся, що усі регулювальні функції ліжка правильно працюють та знаходяться у належному стані.

Складання багатофункціонального ліжка



Зображення є орієнтовними. Тому, можуть відрізнятися від оригінального продукту.

1. Розпакуйте усі елементи ліжка.
2. За допомогою гвинтів приєднайте ніжки з колесами до каркасу ліжка (див. Рис. 1):

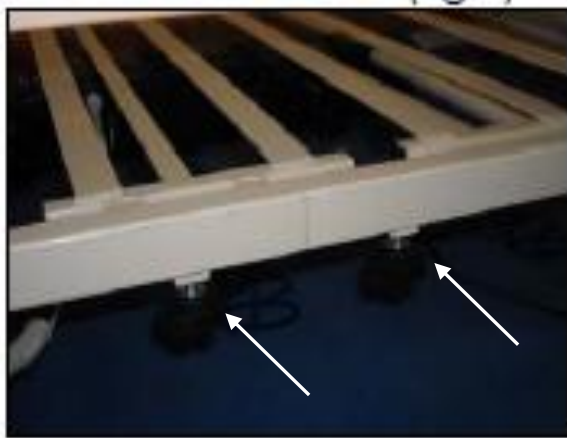


Рис. 1

3. За допомогою засувки приєднайте та закріпіть спинку до каркасу ліжка (менша спинка в ногах, більша у головній частині). (див. Рис. 2, 3):



Рис. 2

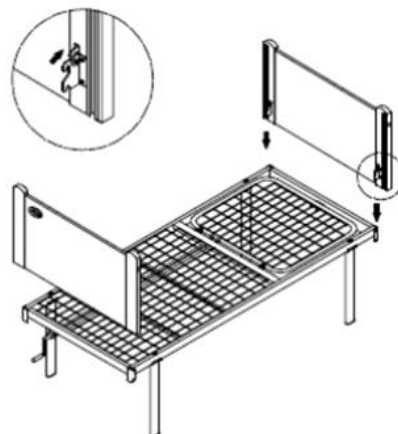


Рис. 3

4. Зніміть спеціальні заглушки з двигуна та закріпіть двигун у належному місці на каркасі ліжка. Переконайтесь, що двигун закріплений вірно відносно головної/ножної секцій. Зафіксуйте двигун заглушками та перевірте надійність кріплення. Підключіть дроти живлення у відповідні отвори. Правий отвір для двигуна головної секції, центральний для пульта управління, лівий – для ножної секції (див. Рис. 4).



Рис. 4



Якщо двигун був установлений на виробництві, пропустіть цей пункт.

5. З обох сторін поруччя ліжка вставте закріплюючий механізм. Вставте направляючі поруччя у спеціальні рейки, які знаходяться на внутрішній стороні спинок ліжка. Бажано налаштувати поруччя з асистентом, щоб вони знаходились паралельно підлозі. Вставивши направляючі у рейки підніміть поруччя вверх доки не почуєте характерне клацання та поки поручні не будуть закріплені у крайньому верхньому положенні (див. Рис. 5).

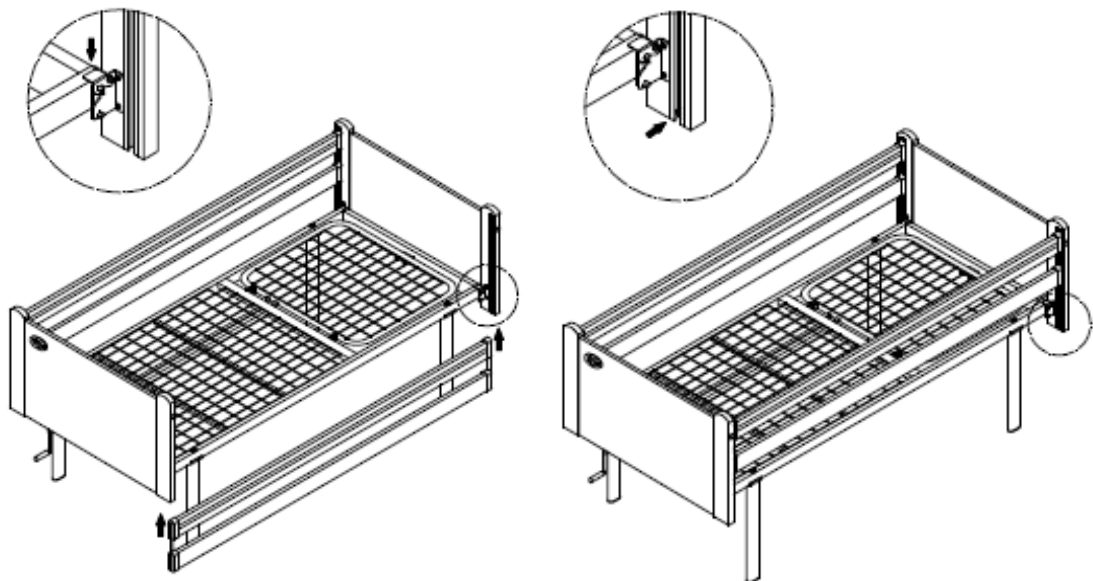


Рис. 5

6. Переконайтесь, що поруччя закріплене правильно: знаходяться паралельно підлозі (немає надмірного нахилу), під час натискання на них рукою вони не ковзають угору або вниз. Для того, щоб опустити поруччя необхідно натиснути на спускові важелі з обох сторін (див. Рис. 6).



Рис. 6

7. Закріпіть обмежувачі для матрацу у спеціальні отвори на каркасі ліжка (див. Рис. 7).



Рис. 7

Управління пультом керування

Керування ліжком здійснюється за допомогою пульта, який дозволяє легко відрегулювати кут нахилу головної та ножної секцій, а також висоту ліжка над підлогою. Пульт керування простий у використанні, фіксується на бічні поручні на комфортній для користувача відстані.



Регулювання положення головної секції

Проводиться за допомогою лівої (підйом) та правої (спуск) кнопок на пульті регулювання.



Регулювання положення ножної секції

Проводиться за допомогою лівої (підйом) та правої (спуск) кнопок на пульті регулювання.



Одночасне регулювання ножної та головної секцій

Проводиться за допомогою лівої кнопки (одночасний підйом) та правої кнопки (одночасне опускання) на пульті управління.



Регулювання висоти ліжка над підлогою

Проводиться за допомогою лівої (підйом) та правої (спуск) кнопок на пульті регулювання.



Регулювання куту нахилу

Проводиться за допомогою лівої (підйом/спуск) та правої (підйом/спуск) кнопок на пульті регулювання.



Рис. 8

На пульті керування передбачено блокування від небажаного натискання. Активна перша (нижня) позиція забороняє управляти усіма позиціями окрім кута нахилу головної секції, середня – блокує керування усіма позиціями, верхня – дозволяє керувати усіма передбаченими позиціями. (опціонально) (див. Рис. 8).



Рис. 9

Блокування коліс

Для блокування коліс слід натиснути на нижню частину гальмівного фіксатору, а щоб розблокувати колеса слід натиснути на верхню частину гальмівного фіксатору (див. Рис. 9).



Рис. 10

Аварійне опускання ліжка

У разі відсутності електроживлення ліжко можна опустити в початкове положення за допомогою пульта керування. Для цього необхідно вставити батарейку типу «Крона» у відсік для елементів живлення в моторі (див. Рис. 10).



Батарейка в комплект до ліжка не входить (необхідно придбати окремо).

6. Технічне обслуговування і догляд



Перевіряйте справність ліжка перед кожним використанням, якщо виріб використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на шість місяців. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

Догляд

Поверхню ліжка обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте ліжко у чистоті для використання протягом тривалого терміну.

Металеві частини очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте ліжко м'якою та чистою ганчіркою.

Для обробки дерев'яних частин використовуйте засоби для очищення меблів. Зміна кольору компонентів під дією ультрафіолету, вологи або температури не є дефектом і не покриваються гарантією.

Переконайтеся, що усі гвинти та елементи регулювання надійно зафіксовані.

У разі виникнення будь-яких негараздів, негайно зв'яжіться з найближчим дилером. Ніколи не використовуйте несправне ліжко та не намагайтеся ремонтувати його самостійно!

Тривале зберігання


1. Поверніть ліжко у початкову позицію, відключіть від електромережі.
2. Від'єднайте від роз'ємів електродвигун та пульт.
3. Зніміть усі аксесуари.
4. Покладіть на ліжко простирадло.
5. Враховуйте усі фактори навколишнього середовища (волога, температура тощо).

7. Усунення несправностей

Проблема	Можлива причина	Рішення
☹ Під час натискання на кнопки на пульті нічого не відбувається.	☹ Не підключено електрошнур. ☹ Немає напруги у розетці (мережі). ☹ Не підключені інші кабелі.	☺ Включіть електричний дріт у мережу. ☺ Перевірте розетку. ☺ Перевірте з'єднання пульта, електродвигуна, батарей.
☹ Електродвигун працює зі збоями.	☹ Механічні перешкоди в агрегатах обертання. ☹ Перевищено максимальне навантаження.	☺ Заберіть будь-які предмети, що заважають обертанню. ☺ Скорегуйте навантаження.
☹ Зупинка після тривалої роботи.	☹ Перегрівання двигуна.	☺ Зачекайте, доки двигун охолоне.
☹ Відбувається рух у протилежному напрямку.	☹ Роз'єм електродвигуна перевернуто.	☺ Зв'яжіться з Вашим дилером.

8. Належна утилізація продукту

Цей символ на приладі або у паспорті до нього вказує, що даний продукт не підлягає утилізації разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Для запобігання можливої шкоди для навколишнього середовища або здоров'я людини через неконтрольовану утилізацію відходів, будь ласка, відокремте цей прилад від інших типів відходів і утилізуйте його належним чином для раціонального повторного використання матеріальних ресурсів.

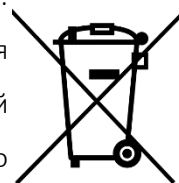


Даний продукт не містить ніяких шкідливих речовин.

¹Цей прилад ТМ «OSD» виготовлено в умовах застосування системи суворого контролю якості.

²Медичне ліжко «OSD-9550» відповідає технічним умовам і визнане придатним для експлуатації.

9. Символи та їх значення

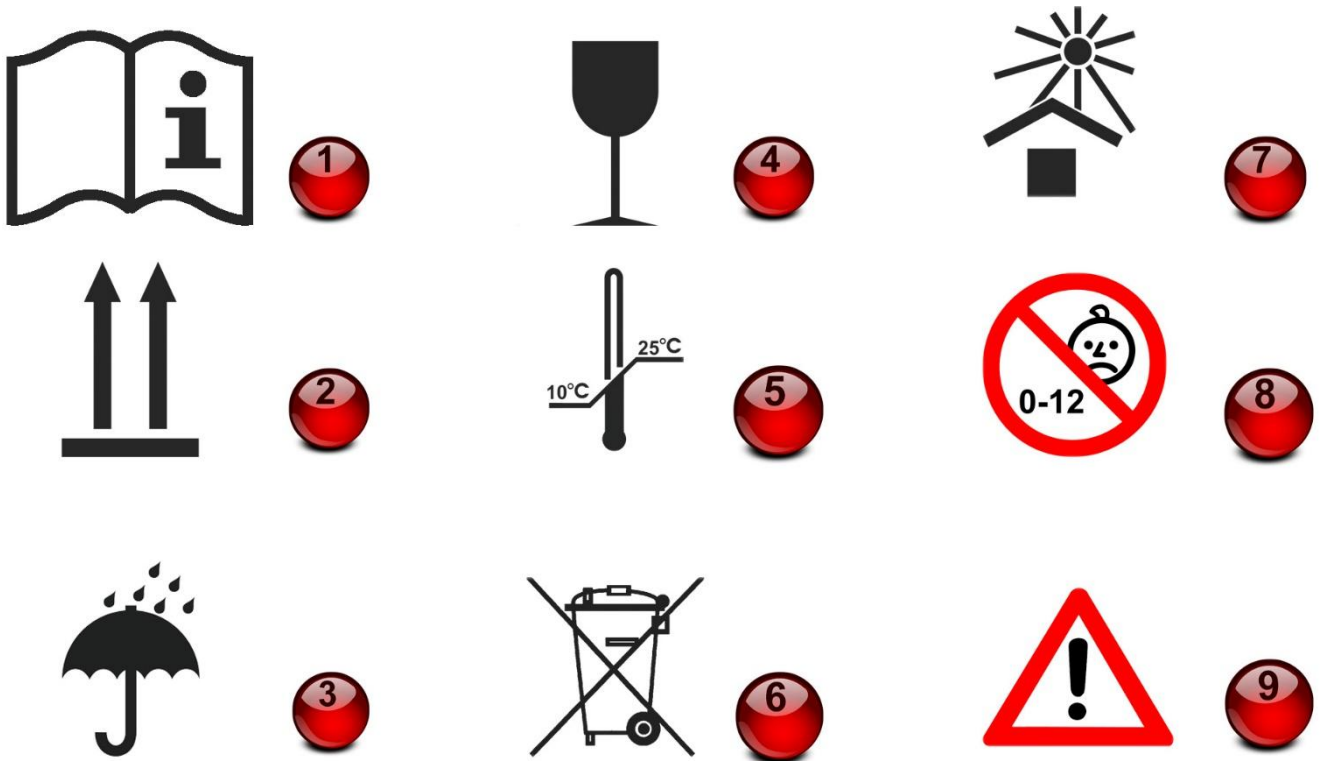

1 – «Увага! Ознайомтеся з усіма супровідними документами!». Цей символ означає, що користувачеві обов'язково потрібно ознайомитись з Інструкцією з експлуатації.

2 – «Вгору!». Цей символ означає, що тут знаходиться верх виробу.

3 – «Боїться вологи!». Цей символ означає, що виріб може зберігатися та використовуватися тільки у сухому місці.

4 – «Увага! Крихкий виріб!». Цей символ означає, що потрібно обережно поводитися з виробом.

5 – «Дотримуйтеся температурного режиму!». Цей символ означає, що температурна межа для зберігання даного виробу становить: min = 10°C, а max = 25°C.

6 – «Належна утилізація!». Цей символ означає, що продукт не можна викидати до звичайних контейнерів на відходи. Обов'язком споживача є передача виробу до визначеного пункту збору з метою рециклінгу електровідходів (опереробка відходів).

7 – «Не нагрівати виріб!». Цей символ означає, що виріб потрібно зберігати якнайдалі від прямих сонячних променів.

8 – «Вікове обмеження для дітей!». Цей символ позначає вікове обмеження для дітей віком до 12 років.

9 – «Обережно!». Цей символ позначає неправильну експлуатацію, яка може завдати шкоди користувачеві або виробу.

10. Відомості про сертифікацію

Виріб «OSD-9550» відповідає технічним вимогам і визнано придатними для експлуатації.



Виробник: Hong Ky Co., Ltd / Гонг Ки Ко., Лтд

D2 Street, Binh Chuan Manufacturing Zone, Thuan An, Binh Duong Province, Vietnam / Д2 Стреет, Бінг Чуан Мануфацтурінг Зоне, Тгуан Ан, Бінг Дуонг Провінце, В'єтнам.



Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа». Адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2 ; Тел.: +38 (044) 232 44 51, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: № 4 від 23.07.2025.

Дата виготовлення: див. на маркуванні.

Термін придатності виробу: див. на маркуванні.

Гарантійний термін на **виріб «OSD-9550»** – 12 місяців з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.

11. Умови гарантії



ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____