



Подушка для сидіння:

OSD-4000-C

Інструкція

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Подушка для сидіння «OSD-4000-C» (далі за паспортом – виріб / подушка) – рекомендована для застосування у медичних закладах та вдома.

Розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.



Запобігайте контакту продукту з гострими предметами, а також потраплянню попелу від цигарок.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ



Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будь-які характеристики, зазначені у цій Інструкції. Усі дані, зазначені в Інструкції, наведені для ознайомлення.

1. **РЕГУЛЯРНО** перевіряйте цілісність усього виробу.
2. **НЕ ТРИМАЙТЕ** виріб поруч з інтенсивним джерелом тепла (висока температура, прямі сонячні промені, відкрите полум'я).
3. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** щільні товсті матерії, покривала тощо. Це зменшить терапевтичний ефект дії виробу. За необхідності проконсультуйтеся з лікарем.
4. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** попаданню на виріб маслянистих або жирних речовин. Це може порушити структуру матеріалу покриття подушки та порушити її функціональність.
5. **З МІРКУВАНЬ ПІГІЕНИ** усі засоби, що використовуються для профілактики пролежнів повинні **ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ ВИКЛЮЧНО** одним пацієнтом.
6. **У ВИПАДКУ** нетримання сечі, чохол і сама подушка **ПОВИННІ** бути **ОЧИЩЕНІ**.
7. **НЕ ПРОКОЛЮЙТЕ** виріб.
8. **У ВИПАДКУ** використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Модель:	OSD-4000-C
Призначення:	для сидіння
Матеріал:	силіконізоване волокно
Чохол:	бавовна
Розміри, Д x Ш x В, (см):	40 x 43 x 10

ОЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ПОДУШКИ

Очищення



1. Прання у делікатному режимі до 30 °C.
2. Не піддавати сухому хімічному чищенню.
3. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор).
4. Сушити далеко від джерел тепла.
5. Не прасувати.

Зберігання

1. Зберігати на рівній поверхні.
2. Не допускати дії інтенсивного тепла.
3. Для максимальної довговічності має зберігатися у теплому, чистому місці, захищений від вогню та світла.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Обробляйте виріб дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонт виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____ Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «OSD-4000-C» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.



Виробник: China Effort Limited / Чайна Ефорт Лімітед.
RM 2806-7 New Treasure Centre, 10 Ng Fong Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong / PM 2806-7 Нью Трешью Центр, 10 Нг Фонг Стріт, Сан По Конг, Каулун, Гонк Конг.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 8 від 06.07.2021.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Термін придатності виробу: див. на маркуванні.

Гарантійний термін на виріб «OSD-4000-C» – 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

