



## Подушка з гелю різної щільності «Easy Seat Duo»

94004050

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.  
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.

## ЗМІСТ

1. Вступ.....	3
2. Заходи безпеки .....	3
3. Технічні характеристики.....	4
4. Очищення та дезінфекція подушки «Easy Seat Duo».....	5
5. Відомості про сертифікацію.....	5
6. Належна утилізація продукту .....	6
7. Умови гарантії .....	7

## 1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте подушку для сидіння, не ознайомившись з Інструкцією.**

**Не використовуйте подушку для сидіння у випадку її пошкодження.**

**Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Ортопедичну подушку «94004050» розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача. Розраховано для використання у житлових приміщеннях.

Подушка має анатомічну форму, тому важливо переконатись, що:

- розмір подушки відповідає розмірам крісла/візка;
- постарайтесь не використовувати подушку на похилій поверхні;
- переконайтесь, що подушка правильно розташована у кріслі.

Основа подушки виготовлена з м'якої поліуретанової піни. Наповнювач рівномірно розподіляє тиск, забезпечуючи максимальний комфорт користувачеві.

Комбінована подушка (піна та гель), анатомічної форми, складається з двох в'язкопружних гелів та пружної поліуретанової піни з високою щільністю та знімного захисного чохла.

Першочерговою мірою профілактики утворення пролежнів є зміна опорних точок тіла на матраці. У лежачому положенні у середньому кожні три години їх потрібно змінювати. У сидячому положенні тіло потрібно підіймати якомога частіше, щоб зменшити тиск на кровеносні судини, забезпечуючи правильну циркуляцію крові.

Подушка виконана з пінополіуретану та двох сегментів в'язкопружного гелю різної щільності. Під вагою людини гель моделює форму, необхідну для рівномірного розподілу тиску і підвищення якості комфорту користувача.

Чохол виготовлений з водостійкого поліуретану. Легко знімається для чищення.



**Запобігайте контакту продукту з гострими предметами, а також потраплянню попелу від цигарок.**

## 2. Заходи безпеки

Перед початком використання подушки або під час використання після тривалого зберігання переконайтесь, що усі частини подушки знаходяться у належному стані. Регулярно перевіряйте

загальний технічний стан подушки.

1. Проводьте **ЩОДЕННИЙ** огляд подушки «Easy Seat Duo» на наявність будь-яких недоліків.
2. **РЕГУЛЯРНО** перевіряйте цілісність усієї подушки.
3. **НЕ ТРИМАЙТЕ** виріб поруч з інтенсивним джерелом тепла (висока температура, прямі сонячні промені, відкрите полум'я).
4. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** щільні товсті матерії, покривала тощо. Це зменшить терапевтичний ефект дії виробу. За необхідності проконсультуйтеся з лікарем.
5. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** попаданню на виріб маслянистих або жирних речовин. Це може порушити структуру матеріалу покриття подушки та порушити її функціональність.
6. З міркувань гігієни усі засоби, що використовуються для профілактики пролежнів повинні **ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ ВИКЛЮЧНО** одним пацієнтом.
7. У випадку нетримання сечі, чохол і сама подушка **ПОВИННІ** бути **ОЧИЩЕННІ**.
8. Подушка для сидіння не повинна використовуватись для підтримки інших частин тіла (**ТІЛЬКИ** зона сідниць).
9. **НЕ ПРОКОЛЮЙТЕ** виріб.
10. Тримайте у **НЕДОСТУПНОМУ** для дітей місці.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування протипролежневої подушки за умов, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

### 3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	94004050
Наповнювач:	пінополіуретан, гель
Чохол:	поліуретан
Розміри, Д x Ш x В, (см):	41 x 41 x 7
Щільність, (кг/м <sup>3</sup> ):	60

Вага, (кг):	1, 8
Максимальне навантаження, (кг):	120

#### 4. Очищення та дезінфекція подушки «Easy Seat Duo»

##### Очищення



1. Прання у делікатному режимі до 30 °С.
2. Не піддавати сухому хімічному чищенню.
3. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор).
4. Сушити далеко від джерел тепла.
5. Не прасувати.

##### Зберігання

Зберігати на рівній поверхні. Не допускати дії інтенсивного тепла. Для максимальної довговічності має зберігатися у теплом, чистому місці, захищений від вогню та світла.

#### 5. Відомості про сертифікацію

Подушка з гелю різної щільності «94004050» відповідає технічним вимогам і визнана придатною для експлуатації.



**Виробник:** Dongguan China Effort Healthcare Products Co., Ltd. / Донггуан Чайна Ефорт Хелскеар Продакт Ко., Лтд.

17 Quling 2nd Road, Quantang Village, Liaobu Town, Dongguan City, Guangdong Province, China / 17Клінг 2нд Рoad, Кантанг Вілледж, Ліаобу Таун, Донггуан Сіті, Гуангдонг Провінс, Китай.

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

**Номер редакції:** № 2 від 23.05.2018.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

Гарантійний термін на подушку з гелю різної щільності «94004050» – 1 рік з дати продажу за


умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.

## 6. Належна утилізація продукту

Цей символ на приладі або у паспорті до нього вказує, що даний продукт не підлягає утилізації разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Для запобігання можливої шкоди для навколишнього середовища або здоров'я людини через неконтрольовану утилізацію відходів, будь ласка, відокремте цей прилад від інших типів відходів і утилізуйте його належним чином для раціонального повторного використання матеріальних ресурсів.

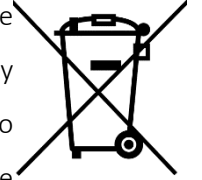

Даний продукт не містить ніяких шкідливих речовин.



## 7. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
  - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.**

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_