



Підйомне крісло з двома моторами

OSD-BERGERE-FM14-1LD-R

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.

ЗМІСТ

1.	Вступ.....	3
2.	Заходи безпеки	3
3.	Технічні характеристики.....	4
4.	Підготовка до використання	5
5.	Технічне обслуговування і догляд.....	6
6.	Відомості про сертифікацію	7
7.	Умови гарантії	8

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією та дотримуйтесь її під час використання виробу. Збережіть її для отримання необхідної інформації у майбутньому.



Не використовуйте крісло не ознайомившись з Інструкцією.

Не використовуйте крісло у випадку його пошкодження.

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Підйомне крісло ТМ «OSD» – це сучасне багатофункціональне пристосування, яке дозволяє відпочити та розслабитися в умовах максимального затишку і комфорту. Крісло призначене для використання літнім людям, людям з обмеженими можливостями і тим, хто має труднощі під час вставання, а також усім, хто бажає отримати повноцінний комфортний відпочинок.

Конструкція крісла складається з металевих та дерев'яних елементів. М'яке покриття може бути виготовлене з альканти, велюру, котону, шкіри, замшу або замши. Спинка крісла та підніжка являють собою цілісний рухомий механізм, вбудований у раму.

Чотири прогумовані ніжки, що регулюються за висотою, дозволяють надійно встановити крісло на поверхні. Обладнаний приводом з електронним управлінням, крісло опускається та підіймається за допомогою спеціального пульта керування.

Рама крісла виготовлена з металу та дерева. Велика металева база збільшує стабільність під час спуску/підняття. Ізольований низьковольтний пульт керування.

Крісло «OSD-BERGERE-FM14-1LD-R» розроблене для максимальної зручності та безпеки користувача. Розраховане для використання у житлових приміщеннях.



Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будь-які технічні характеристики, зазначені у цій Інструкції. Усі дані, зазначені в Інструкції, наведені для ознайомлення.

2. Заходи безпеки

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування крісла за умов, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

1. Перед використанням **УВАЖНО** ознайомтеся з Інструкцією.
2. Перед кожним використанням **ПЕРЕВІРЯЙТЕ** загальний технічний стан виробу. Не

використовуйте його на разі виявлення пошкоджень.

3. Максимально допустиме навантаження на підйомне крісло становить 130 кг. **НІКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
4. **НЕ СИДАЙТЕ** на поруччя або підніжку.
5. **НЕ ПАЛІТЬ** у підйомному кріслі.
6. Кожні два роки слід **ПРОВОДИТИ** повний кваліфікований технічний огляд крісла.
7. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** попадання рідин на електричні частини або мотор крісла.
8. Під час використання крісла **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що у радіусі 50 см не перебувають діти або домашні тварини. Це може призвести до виникнення травматичних ситуацій.
9. **НЕ РОЗТАШОВУЙТЕ** підйомне крісло близько до стін або меблів: **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що навколо крісла достатньо вільного місця для приведення його в розкладене положення.

3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-BERGERE-FM14-1LD-R
Колір:	бежевий
Матеріал оббивки:	котон
Матеріал каркасу:	метал, дерево
Загальна висота, (см):	110
Загальна ширина, (см):	82
Ширина сидіння, (см):	50
Глибина сидіння, (см):	54
Висота сидіння від підлоги, (см):	50
Висота спинки від сидіння, (см):	74

Кількість моторів:	2
Вага, (кг):	55
Максимальне навантаження, (кг):	130


4. Підготовка до використання



Перевіряйте справність крісла перед кожним використанням, якщо крісло використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на шість місяців. На разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, не використовуйте виріб.

Збирання:

1. У першу чергу встановіть спинку.

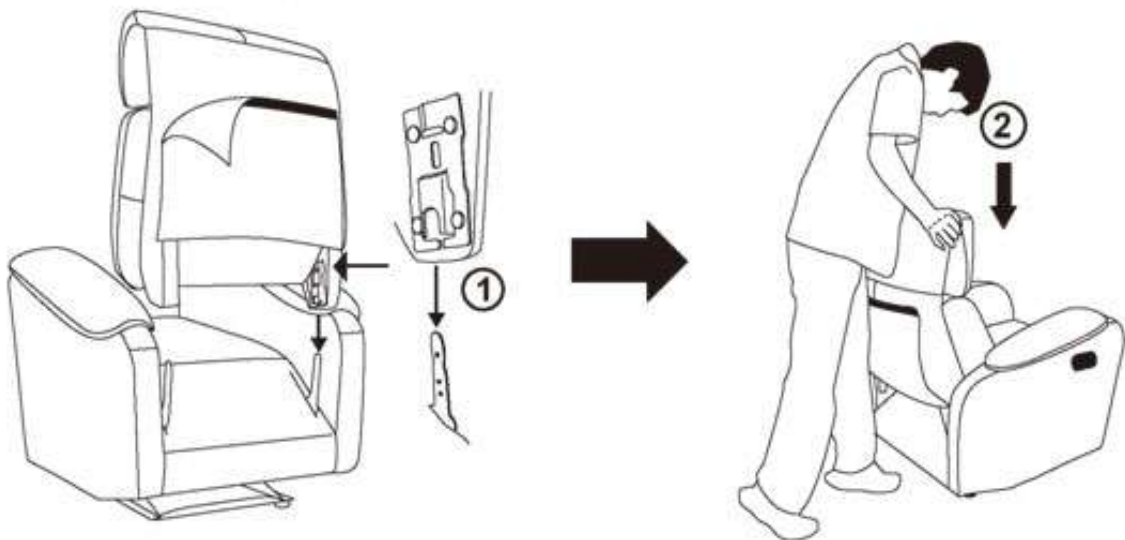


2. Закріпіть спинку на фіксатори до упору. Перед використанням переконайтеся, що обидві сторони спинки закріплені вірно.
3. Щільно прикрийте усі частини крісла, закріпивши тканину спереду та ззаду за допомогою застібок-велкро (з липучкою).



Управління:

- Крісло обладнане двома електромоторами, які призводять крісло у горизонтальне положення й навпаки. Регулювання відбувається за допомогою пульта керування.
- Функція підйому / нахилу вперед дозволяє користувачу без зусиль встати з крісла або сісти у нього.

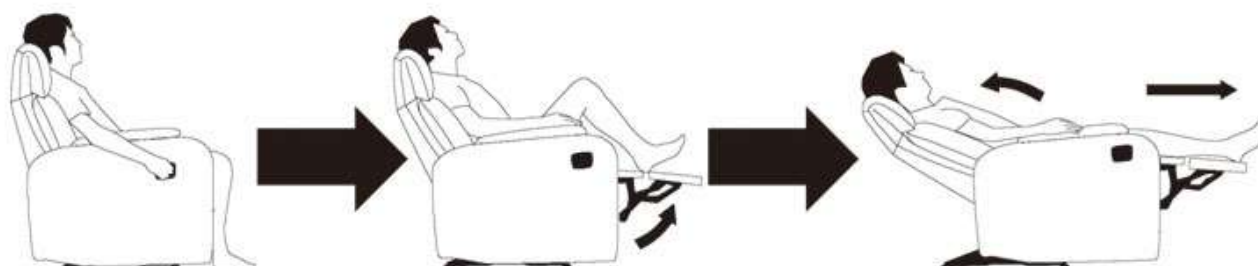

5. Технічне обслуговування і догляд

Котон

Періодично перевіряйте оббивку на наявність ознак зносу (розриви; порізи тощо). Рекомендуємо чистити тканину за допомогою пилососу або м'якої щітки. За необхідності можна використовувати (але не рекомендується) вогку губку або ганчірку, змочену у м'якому миючому розчині. Переконайтеся, що ганчірка або губка підходять для очищення даного типу матеріалу.

Уникайте сильного тертя й використання пару.



[6]

Офіційна веб-сторінка: osd.ua

Оббивка крісла не знімається.



Розміщуйте підйомне крісло на відстані не менше 50 сантиметрів від джерела тепла. Не піддавайте виріб прямому впливу сонячного світла, це може призвести до вицвітання оббивки.

Електрична система

Періодично перевіряйте електричну систему й пульт керування на наявність розривів, розломів та пошкоджень проводів. Переконайтеся, що всі компоненти підключені правильно. Не проводьте ремонт самостійно та зверніться за кваліфікованою допомогою.

6. Відомості про сертифікацію

Виріб «OSD-BERGERE-FM14-1LD-R» відповідає технічним вимогам і визнано придатними для експлуатації.



Виробник: Jiangsu Artis Furniture Co.,Ltd / Джангсу Артїс Фурнітуре Ко.,Лтд Industrial Park, Gangyang Town, Hailing District, Taizhou City, Jiangsu Province, China, 225300 / Індустріал Парк, Ганганг Таун, Хаїлінг Дістрікт, Таїжоу Сіті, Джангсу Провінце, Китай, 225300.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський, 100/2.

Тел.: +38 (044) 232-44-51, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: № 2 від 12.03.2024.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін на виріб «OSD-BERGERE-FM14-1LD-R» – 12 місяців з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.

7. Умови гарантії



ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____