




Подушка протипролежнева

OSD-HCU21G

Інструкція з експлуатації

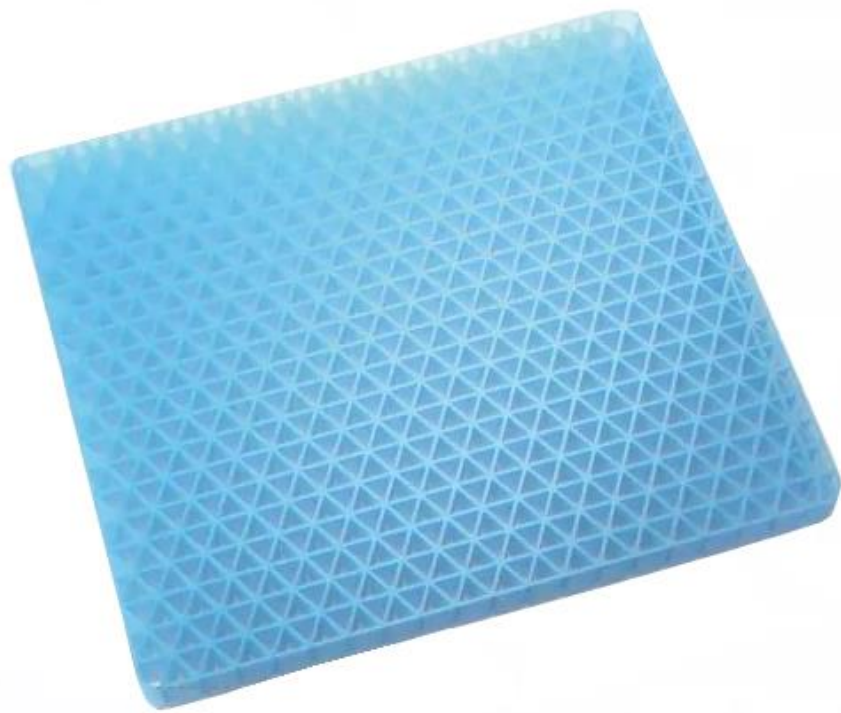

Дякуємо, що обрали нашу продукцію.

Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС

ЗМІСТ

1. Вступ.....	3
2. Заходи безпеки	3
3. Технічні характеристики.....	4
4. Очищення та дезінфекція подушки	4
5. Відомості про сертифікацію.....	5
6. Умови гарантії	6

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



Не використовуйте подушку для сидіння з гелем, не ознайомившись з Інструкцією.

Не використовуйте подушку для сидіння з гелем у випадку її пошкодження.

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Ортопедичну подушку «OSD-HCU21G» розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача. Розраховано для використання у житлових приміщеннях.

Медична охолоджуюча гелева подушка зі сітчастою кришкою. Першочерговою мірою профілактики утворення пролежнів є зміна опорних точок тіла на матраці. У лежачому положенні у середньому кожні три години їх потрібно змінювати. У сидячому положенні тіло потрібно підіймати якомога частіше, щоб зменшити тиск на кровonosні судини, тим самим забезпечити правильну циркуляцію крові.

Завдяки гелювій рідині подушка «OSD-HCU21G» гарантує оптимальний розподіл ваги тіла пацієнта, зменшуючи тиск на капіляри та запобігаючи їх перетисканню. Це надає відчуття легкості під час сидіння на подушці.



Запобігайте контакту продукту з гострими предметами, а також потраплянню попелу від цигарок.

2. Заходи безпеки

Перед початком використання подушки або під час використання після тривалого зберігання переконайтеся, що усі частини подушки знаходяться у належному стані. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан подушки.

1. Проводьте **ЩОДЕННИЙ** огляд подушки «OSD-HCU21G» на наявність будь-яких недоліків.
2. **РЕГУЛЯРНО** перевіряйте цілісність усієї подушки.
3. **НЕ ТРИМАЙТЕ** виріб поруч з інтенсивним джерелом тепла (висока температура, прямі сонячні промені, відкрите полум'я).
4. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** щільні товсті матерії, покривала тощо. Це зменшить терапевтичний ефект дії виробу. За необхідності проконсультуйтеся з лікарем.

5. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** попаданню на виріб маслянистих або жирних речовин. Це може порушити структуру матеріалу покриття подушки та порушити її функціональність.
6. З міркувань гігієни усі засоби, що використовуються для профілактики пролежнів повинні **ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ ВИКЛЮЧНО** одним пацієнтом.
7. У випадку нетримання сечі, сітчаста кришка та сама подушка **ПОВИННІ** бути **ОЧИЩЕННІ**.
8. Подушка для сидіння не повинна використовуватись для підтримки інших частин тіла (**ТІЛЬКИ** зона сідниць).
9. **НЕ ПРОКОЛЮЙТЕ** виріб.
10. Тримайте у **НЕДОСТУПНОМУ** для дітей місці.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування протипролежневої подушки за умов, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-HCU21G
Наповнювач:	TPE гель
Розміри, Д x Ш x В, (см):	43 x 38.5 x 3.2
Максимальне навантаження, (кг):	136

4. Очищення та дезінфекція подушки

Очищення



[4]

Офіційна веб-сторінка: osd.ua

1. Прання у делікатному режимі до 30 °С.
2. Не піддавати сухому хімічному чищенню.
3. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор).
4. Сушити далеко від джерел тепла.
5. Не прасувати.

Зберігання

Зберігати на рівній поверхні. Не допускати дії інтенсивного тепла. Для максимальної довговічності має зберігатися у теплом, чистому місці, захищений від вогню та світла.

5. Відомості про сертифікацію

Виріб «OSD-HCU21G» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.



Виробник: Guangdong Yuehua Medical

Instrument Factory Co., Ltd./Гуандунг Юехуа Медікал Інструмент Факторі Ко.,

Rongsheng Science and Technology Zone, Daxue Road, 515063 Shantou, China. /

Ронгшенг Сайнс енд Текнолоджи Зоне, Даксхе Род, 515063 Шантоу, Китай

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»;

адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2.

Тел.: +38 (044) 232-44-51, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: № 2 від 9.05.2024.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін на **протипролежневу подушку «OSD-HCU21G»** – 12 місяців з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.



6. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____