



Система протипролежнева в комплекті: OSD-F-300

Інструкція

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Протипролежневий матрац «OSD-F-300» (далі за паспортом – виріб / матрац) – рекомендовано для застосування у медичних закладах та вдома.

Розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** його у випадку зносу або пошкодження.
- ЯКЩО ВІЯВЛЕНО** несправність, то **НЕ ПРОВІДЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
- НАПОВНЮВАТИ** повітрям матрац **НЕОБХІДНО** за допомогою компресора, що входить у комплект. **ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИСТРОЇВ МОЖЕ ПОШКОДИТИ ВИРІБ.**
- У ВИПАДКУ** використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути інфекцій.
- НЕ ТРИМАЙТЕ** виріб поруч з інтенсивним джерелом тепла (висока температура, прямі сонячні промені, відкрите полум'я).
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ** попадання на виріб маслянистих або жирних речовин. Це може порушити структуру матеріалу покриття матраца та його функціональність.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** щільні товсті матерії, покривала тощо. Це зменшить терапевтичний ефект дії виробу. За необхідності проконсультуйтеся з лікарем.
- НЕ НАМАГАЙТЕСЯ** перемістити обладнання, якщо воно підключене в електромережу.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Матеріал:	ПВХ
Розмір матраца, Д x Ш, (см):	200 x 90

Висота матраца, (см):	7
Робочий тиск компресора, (мм рт. ст.):	від 50 до 110
Тип тиску:	змінний
Функція статичного тиску:	так
Час зміни циклу, (хв.):	6
Час повного циклу, (хв.):	12
Електроживлення, (В / Гц):	110 – 220 / 50 – 60
Максимальне навантаження, (кг):	125
Комплектація:	матрац + компресор + набір для ремонту + з'єднувальні трубки

ВИКОРИСТАННЯ

- Покладіть матрац на ліжку таким чином, щоб компресор (див. Рис. 1) був у нижній частині ложа.
- Використовуйте вбудовані гачки для надійної фіксації компресора на спинці ліжка біля ніг або на місці з гладкою та рівною поверхнею.
- Підключіть компресор до матраца за допомогою з'єднувальних трубок.
- Підключіть компресор до розетки. Переконайтеся, що шнур живлення знаходиться у безпечному положенні.
- Увімкніть кнопку живлення на панелі керування компресора. Матрац автоматично почне заповнюватися повітрям.
- Коли матрац буде повністю надутий, налаштуйте його згідно з потребами користувача, використовуючи тумблер на панелі керування.



Рис. 1

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволенними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкодження або розривів однієї або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
 - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: *Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.*

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «OSD-F-300» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

Виробник: Foshan Hongfeng Co. Ltd. / Фошан Хонгфен Ко. Лтд.
No.4-2 Leqiang Road, Leping, Sanshui, Foshan District, Guangdong Province, China / №4-2 Лекьянг Роад, Лепінг, Саншуй, Фошан Дістрікт, Гуандонг Провінс, Китай.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2. Тел.: +38 (044) 232 44 51, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: № 7 від 10.11.2025.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Термін придатності виробу: див. на маркованні.

Гарантійний термін на виріб: 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

