



Підлокітники для душевого сидіння KING:

KING-A-00, KING-BA-00

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Підлокітники для душевого сидіння «KING-A-00» (далі за паспортом – виріб) – рекомендовано для застосування у медичних закладах та вдома.

Розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача. Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ ЄЕС виробів медичного призначення.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Підлокітники для стільців-туалетів та стільців для душу є додатковим аксесуаром до сидінь KING-SS-00, KING-SSB-00, KING-SS1-00 і KING-SS1B-00, стільців для душу KING-SC-00, KING-SCB-00, KING-SC1-00 і KING-SC1B-00 та стільців-туалетів KING-CMD-00 і KING-CMDB-00. Вони слугують бічною опорою для користувача, що робить сидіння безпечнішим і комфортнішим.

ПОКАЗАННЯ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ

Сидіння для душу, душеві стільці та стільці-туалети призначені для людей літнього віку або людей з обмеженою рухливістю поперекового відділу хребта, колін або стегон, а також для всіх, кому важко стояти під час гігієнічних процедур. Користувач повинен вміти самостійно тримати рівновагу під час пересідання, вставання та сидіння. Заборонено використовувати табурет, якщо у користувача є проблеми з рівновагою або порушення координації.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

- Не перевищуйте максимальну вагу користувача, зазначену в інструкції.
- Перед кожним використанням переконайтеся, що душеве сидіння/стілець правильно зібрані та стійкі.
- Душеве сидіння/стілець можна використовувати лише на рівних поверхнях.

- Під час збирання чітко дотримуйтесь інструкцій.
- Під час монтажу може зрости ризик травмування пальців.
- Не спирайтеся на душеве сидіння/стілець під час сидіння або стояння.
- Не розгойдайтеся на сидінні/стілці, це може призвести до ковзання або просідання ніжок.
- Не модифікуйте душеве сидіння/стілець та його компоненти будь-яким чином.
- Не використовуйте підлокітники для душевого сидіння/стілця, якщо вони пошкоджені або змінені будь-яким чином. Тріщини та деформації можуть значно вплинути на функціональність та безпеку аксесуара.
- Після використання душеве сидіння/стілець слід прибрати з піддона душу, щоб уникнути перешкод для пересування.
- Не використовуйте душеве сидіння/стілець не за призначенням: сидіння не можна використовувати замість сходиночок.
- Підлокітники не можна зберігати на вулиці.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Технічне обслуговування виробів полягає в процедурах очищення та санітарії. Для забезпечення безпечного використання та належного рівня гігієни користувач повинен перед кожним використанням переконатися у цілісності пристрою та його компонентів. Для процедур очищення та санітарії виконайте такі дії:

1. Одягніть рукавички та інші засоби захисту.
2. Видаліть видимі забруднення перед проведенням ретельної дезінфекції.
3. Для очищення використовуйте воду або неагресивний мийний засіб.
4. Протріть сухою та чистою тканиною.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкодженень або розривів одного або декількох деталей,

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.

4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «KING-A-00» відповідає технічним вимогам і визнано придатним для експлуатації.

Виробник: LM Global Design Ltd / ЛМ Глобал Дизайн Лтд Suite 123, The Capel Building, Mary's Abbey, Dublin 7, D07 VY68 Ireland / Сьюіт 123, Зе Капел Білдінг, Аббатство Марії, Дублін 7, Ді07 ВіУай68 Ірландія

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2. Тел.: +38 (044) 232 -44-51, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: № 2 від 14.02.2024.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Термін придатності виробу: див. на маркуванні.

Гарантійний термін на виріб «KING-A-00» – 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.



