



## Спинка до сидіння для душі KING:

**KING-BR1-00**

### ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.  
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.  
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Спинка для сидінь, стільців та стільців-туалетів «KING-BR1-00» (далі за паспортом – виріб) – рекомендовано для застосування у медичних закладах та вдома.

Розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача. Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ ЄЕС виробів медичного призначення.

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Спинка для сидінь, стільців та стільців-туалетів - це додатковий аксесуар до душових сидінь KING-SS1-00 і KING-SS1 A-00, душових стільців KING-SC1-00 і KING-SC1A-00, а також стільців-туалетів KING-CMD-00 і KING-CMDA-00. Вона служить додатковою підтримкою для спини користувача, що робить сидіння безпечнішим і комфортнішим.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

- Не перевищуйте максимальну вагу користувача, зазначену в інструкції.
- Перед кожним використанням переконайтеся, що душове сидіння/стілець і стілець-туалет правильно зібрані та стійкі.
- Душове сидіння/стілець і стілець-туалет можна використовувати лише на рівних поверхнях.
- Під час збирання чітко дотримуйтесь інструкцій у посібнику користувача.
- Під час монтажу може зрости ризик травмування пальців.
- Не спирайтеся на душове сидіння/стілець і стілець-туалет під час сидіння або стояння.
- Не розгойдуйтеся на сидінні/стільці, це може призвести до ковзання або просідання ніжок. Завжди встановлюйте душове сидіння/стілець на його 4 ніжках.
- Не модифікуйте душове сидіння/стілець і стілець-туалет та його компоненти будь-яким чином.

- Не використовуйте спинку для душового сидіння/стільця і стільця-туалету, якщо вона пошкоджена або змінена будь-яким чином. Тріщини та деформації можуть значно вплинути на роботу та безпеку аксесуара.
- Після використання душове сидіння/стілець і стілець-туалет слід зняти з піддона душі, щоб не заважати пересуванню.
- Не використовуйте душове сидіння/стілець і стілець-туалет не за призначенням: сидіння не можна використовувати замість сидіння.
- Спинку для душового сидіння/стільця і стільця-туалету не можна зберігати на вулиці.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

### ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Технічне обслуговування душового сидіння/стільця і стільця-туалету полягає в процедурах очищення та санітарії. Крім того, користувач зобов'язаний перед кожним використанням перевіряти цілісність конструкції пристрою та його компонентів, а також додатково перевіряти кріплення. Для процедур очищення та санітарії виконайте такі дії:

1. Одягніть рукавички та інші засоби захисту.
2. Видаліть видимі забруднення перед проведенням ретельної дезінфекції.
3. Для очищення використовуйте воду або неагресивний мийний засіб.
4. Протріть сухою та чистою тканиною.

**ПРИМІТКА:** Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



**Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкоджені або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.**

### УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
  - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - б) пошкодження, які викликані потрапленням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.

4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.**

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_

### ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

**Виріб «KING-BR1-00»** відповідає технічним вимогам і визнано придатним для експлуатації.

**Виробник:** LM Global Design Ltd / ЛМ Глобал Дизайн Лтд Suite 123, The Capel Building, Mary's Abbey, Dublin 7, D07 VY68 Ireland / Сьюіт 123, Зе Капел Білдінг, Аббатство Марії, Дублін 7, Ді07 ВіУай68 Ірландія

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2. Тел.: +38 (044) 232 -44-51, e-mail: office@osd.com.ua

**Номер редакції:** № 2 від 14.02.2024.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

**Термін придатності виробу:** див. на маркованні.

**Гарантійний термін на виріб «KING-BR1-00»** – 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.



