



Сидіння з ніжками, що кріпиться до стіни PROFILO KING:

KING-PWSL-00

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Сидіння з ніжками, що кріпиться до стіни «KING-PWSL-00» (далі за паспортом – виріб) – рекомендовано для застосування у медичних закладах та вдома.

Розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача. Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ ЄЕС виробів медичного призначення.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Настінне сидіння з ніжками KING Profilo призначене для використання під час прийняття душу. Дає змогу користувачеві досягти більшої незалежності, зменшити м'язове навантаження, що виникає в положенні стоячи, а також ризик ковзання та травм. Складана конструкція дає змогу використовувати настінне сидіння навіть у невеликих ванних кімнатах.

ПОКАЗАННЯ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ

Настінне сидіння з ніжками KING Profilo призначене для людей похилого віку, користувачів інвалідних візків, людей з обмеженою рухливістю поперекового, колінного або кульшового суглобів, а також для всіх, кому важко стояти під час гігієнічних процедур у душі. Користувач повинен самостійно тримати рівновагу під час пересідання, вставання та сидіння. Заборонено використовувати настінне сидіння, якщо у користувача є проблеми з рівновагою або порушення координації.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

- Не перевищуйте максимальну вагу користувача, зазначену в інструкції.
- Перед кожним використанням переконайтеся, що настінне сидіння правильно зібране.
- Під час збирання суворо дотримуйтесь інструкцій, наведених у посібнику користувача.

- Під час монтажу може зрости ризик травмування пальців.
- Не модифікуйте настінне сидіння та його компоненти будь-яким чином.
- Не використовуйте настінне сидіння, якщо воно пошкоджене або змінено будь-яким чином. Тріщини та деформації можуть значно вплинути на роботу та безпеку пристрою.
- Після використання настінне сидіння слід скласти в його неробоче положення.
- Не використовуйте настінне сидіння не за призначенням.
- Настінне сидіння не можна зберігати на вулиці.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Обслуговування виробів полягає в процедурах очищення та санітарії. Для забезпечення безпечного використання та належного рівня гігієни користувач повинен перед кожним використанням переконаватися у цілісності пристрою та його компонентів. Для процедур очищення та санітарії виконайте такі дії:

1. Одягніть рукавички.
2. Видаліть видимі забруднення перед проведенням ретельної дезінфекції.
3. Для очищення використовуйте воду або неагресивний мийний засіб.
4. Протріть сухою та чистою тканиною.

ВИМОГИ ДО ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Виріб підходить для повторного використання іншими користувачами. Перед повторним використанням іншими особами сидіння для душу необхідно очистити та продезінфікувати.

ПРАВИЛЬНА ПРОЦЕДУРА УТИЛІЗАЦІЇ

Не викидайте виріб у звичайне побутове сміття. Зверніться до місцевої влади, щоб дізнатися про правильний та екологічно безпечний спосіб його утилізації.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкодження або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонт виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____ Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «KING-PWSL-00» відповідає технічним вимогам і визнано придатним для експлуатації.

Виробник: LM Global Design Ltd / ЛМ Глобал Дизайн Лтд Suite 123, The Capel Building, Mary's Abbey, Dublin 7, D07 VY68 Ireland / Сьюіт 123, Зе Капел Білдінг, Аббатство Марії, Дублін 7, Ді07 ВіУай68 Ірландія

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2. Тел.: +38 (044) 232 -44-51, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: № 2 від 14.02.2024.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Термін придатності виробу: див. на маркуванні.

Гарантійний термін на виріб «KING-PWSL-00» – 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.



