



**Дошка для ванної з ручкою: OSD-BL650206**  
**Стілець для ванної: OSD-BL650205**  
**Стілець для душу: OSD-BL650202**  
**Стілець для ванної зі спинкою: OSD-BL610201**

## ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.

**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.**  
**Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.**  
**Не намагайтесь внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Санітарно-гігієнічне обладнання «OSD-BL650206 / OSD-BL650205 / OSD-BL650202 / OSD-BL610201» (далі за паспортом – виріб / сидіння / сидіння для ванни / стілець-табурет / стілець для ванни та душу / дошка / крісло / обладнання) – розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком використання виробу або під час використання після тривалого зберігання переконайтесь, що усі частини закріплені та міцно зафіковані. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан.

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіковані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** його у випадку зносу або пошкодження.
- НЕОБХІДНО** періодично оглядати виріб на стійкість.
- КОРИСТУВАЧАМ** з обмеженими фізичними можливостями **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** звертатися за допомогою до асистента.
- У ВИПАДКУ** використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Сидіння

Параметр	Значення	
Модель:	OSD-BL650206	OSD-BL650205
Тип:	дошка-сидіння	сидіння
Розмір сидіння, Ш x Г, (см):	70 x 31	41 x 22
Внутрішня ширина ванни, (см):	41 – 64	34 – 60
Максимальне навантаження, (кг):	136	

### Стільці

Параметр	Значення	
Модель:	OSD-BL650202	OSD-BL610201
Тип:	табурет	стілець
Розмір сидіння, Ш x Г, (см):	32 x 32	50 x 35
Висота, (см):	36 – 53	36 – 53
Висота спинки, (см):	–	34
Максимальне навантаження, (кг):	130	

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

**ПРИМІТКА:** Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядаєте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб.



## УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу вкладених у Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - порушення правил експлуатації, вкладених в Інструкції;
  - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
  - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дні купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

**УВАГА:** Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_

## ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Санітарно-гігієнічне обладнання «OSD-BL650206 / OSD-BL650205 / OSD-BL650202 / OSD-BL610201» відповідає технічним вимогам і визнано придатним для експлуатації.

**Виробник:** Bliss Health Products Co., Ltd / Блісс Хелс продуктс Ко., Лтд. 96, Zhaoyi Rd., Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, P.R.C / 96, Чжаої Рд, Донгшен Таун, Жонгшан Сіті, Гуандунг Провінс, Китай.

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський, 100/2.

Тел.: +38 (044) 232 44 51, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: № 10 від 07.03.2024.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Термін придатності виробу: див. на маркованні.

Гарантійний термін на санітарно-гігієнічне обладнання «OSD-BL650206 / OSD-BL650205 / OSD-BL650202 / OSD-BL610201» – 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

