



Санітарна ємність з кришкою для крісла-туалета KING:

KING-BC-00

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Санітарна ємність з кришкою для крісла-туалета KING «KING-BC-00» (далі за паспортом – виріб / туалетне сидіння / сидіння для туалету / насадка / сидіння) – рекомендовано для застосування у медичних закладах та вдома.

Розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Санітарна ємність та кришка для стільця-туалету - аксесуар до стільців KING-CMD-00, KING-CMDB-00, KING-CMDA-00 і KING-CMDBA-00.

ПОКАЗАННЯ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ

Стілець-туалет з санітарною ємністю та кришкою призначений для людей похилого віку, користувачів інвалідних візків, людей з обмеженою рухливістю поперекового, колінного або кульшового суглобів, а також для всіх, кому важко стояти під час гігієнічних процедур у душі або хто потребує додаткової опори під час користування туалетом. Користувач повинен самостійно тримати рівновагу під час пересідання, вставання та сидіння. Заборонено використовувати стілець-туалет, якщо у користувача є проблеми з рівновагою або порушення координації.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

- Не перевищуйте максимальну вагу користувача, зазначену в інструкції.
- Перед кожним використанням переконайтеся, що стілець-туалет правильно зібраний і стійкий.
- Стілець-туалет можна використовувати лише на рівних поверхнях.

- Під час збирання чітко дотримуйтесь інструкцій у посібнику користувача.
- Перед розміщенням стільця-туалету над унітазом перевірте, чи опори відра закриті.
- Під час монтажу може зрости ризик травмування пальців.
- Не розгойдуйтеся на стільці-туалеті, це може призвести до ковзання, перекидання або просідання ніжок. Завжди встановлюйте стілець-туалет на його 4 ніжках.
- Не модифікуйте стілець-туалет та його компоненти будь-яким чином.
- Не використовуйте стілець-туалет, якщо він пошкоджений або змінений будь-яким чином. Тріщини та деформації можуть значно вплинути на роботу та безпеку пристрою.
- Після використання виробу як сидіння для душі його слід прибрати з піддона.
- Не використовуйте стілець-туалет не за призначенням.
- Стілець-туалет не можна зберігати на вулиці.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Технічне обслуговування виробів полягає в процедурах очищення та санітарії. Для забезпечення безпечного використання та належного рівня гігієни користувач повинен перед кожним переконатися у цілісності пристрою та його компонентів, а також перевірити кріплення. Для процедур очищення та санітарії виконайте такі дії:

1. Одягніть рукавички.
2. Видаліть видимі забруднення перед проведенням ретельної дезінфекції.
3. Для очищення використовуйте воду або неагресивний мийний засіб.
4. Протріть сухою та чистою тканиною.

ВИМОГИ ДО ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Виріб підходить для повторного використання іншими користувачами. Перед повторним використанням іншими особами стілець-туалет необхідно очистити та продезінфікувати.

ПРАВИЛЬНА ПРОЦЕДУРА УТИЛІЗАЦІЇ

Не викидайте виріб у звичайне побутове сміття. Зверніться до місцевої влади, щоб дізнатися про правильний та екологічно безпечний спосіб його утилізації.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



**розривів
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.**

Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкодженнь або одного або декількох деталей,

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «KING-BC-00» відповідає технічним вимогам і визнано придатним для експлуатації.

Виробник: LM Global Design Ltd / ЛМ Глобал Дизайн Лтд Suite 123, The Capel Building, Mary's Abbey, Dublin 7, D07 VY68 Ireland / Сьюті 123, Зе Капел Білдінг, Аббатство Марії, Дублін 7, Ді07 ВіУай68 Ірландія
Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосівський (40-Річчя Жовтня), 100/2. Тел. +38 (044) 232 44 51, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: № 2 від 14.02.2024.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Термін придатності виробу: див. на маркованні.

Гарантійний термін на виріб «KING-BC-00» – 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.



