



Крісло-туалет з м'яким сидінням

OSD-2110QAB

Інструкція

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Крісло-туалет «OSD-2110QAB» (далі за паспортом – виріб / обладнання) – розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

Виріб розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача. Відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.



Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будь-які характеристики, зазначені у цій Інструкції. Усі дані, зазначені в Інструкції, наведені для ознайомлення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗА УМОВ** зміни положення центру ваги за рахунок зміщення тіла або через зміну навантаження на крісло-туалет, а також нахилу на кут більше 10 градусів, підвищується можливість перекидання.
- НЕ ЗАЛИШАЙТЕ** користувача у крісло-туалеті без нагляду.
- УСТАНОВЛЮЙТЕ** крісло-туалет на рівну горизонтальну поверхню.
- АСИСТЕНТ ПОВИНЕН:**
 - перевірити належну якість крісла-туалету;
 - попереджати користувача про свої дії, особливо під час нахилу крісла-туалету.
- НЕ НАХИЛЯТИ** крісло-туалет уперед.
- МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЕ** навантаження на крісло-туалет — 136 кг. **НИКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
- НЕ НАМАГАЙТЕСЯ** вставати, сідати, робити кроки, підніматися, нахилитися самостійно: хтось завжди повинен вам допомагати.
- НЕ НАХИЛЯЙТЕСЯ**, сидячи у кріслі-туалеті, намагаючись дотягтися до чого-небудь, оскільки Ви можете перевернутися!
- НА РАЗІ** використання виробу різними користувачами рекомендується систематично і ретельно мити та дезінфікувати крісло-туалет, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Матеріал рами:	алюміній
Конструкція рами:	розбірна; складана
Поруччя:	фіксовані
Ширина сидіння, (см):	46
Висота сидіння від підлоги, (см):	55 — 66
Максимальне навантаження, (кг):	136
Вага виробу, (кг):	5,06
Комплектація:	санітарна ємність з протикраплинною системою та кришкою
Гарантія, (міс.):	12

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

- Поруччя крісла-туалету – фіксовані. Покриті нековзкими накладками для надійної опори для рук.
- Рама крісла-туалету виготовлена з алюмінію з використанням технології порошкового фарбування, яка збільшує термін експлуатації виробу.
- Висота крісла-туалету регулюється кнопковим фіксатором.
- Ніжки крісла-туалету на литих колесах розміром 3”.
- Сидіння зі змінною кришкою виконано з екошкіри з поролоновим наповнювачем.
- Санітарне обладнання – з'ємне, виготовлено з гіпоалергенної пластмаси.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Крісло-туалет _____ 1 шт.
- Санітарна ємність з протикраплинною системою та кришкою _____ 1 шт.
- Інструкція _____ 1 прим.



Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкодження або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених в Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
 - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром. **УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.***

Дата продажу: _____ Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «OSD-2110QAB» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

Виробник: Жонгшан Куїн Медікал Еквіпмент Ко., Лтд. / Zhongshan Qunn Medical Equipment Co., Ltd. 3 Бус No108 Чжаойі Род, Донгшенг Таун, Жонгшан Сіті, Гуангдонг, Китайська народна республіка / 3rd Booth No. 108 Zhaoyi Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong, The people's republic of China.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський, 100/2. Тел.: +38 (044) 232 44 51, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: № 2 від 02.08.2024.

Термін придатності виробу: див. на маркованні.

Гарантійний термін на виріб «OSD-2110QAB»: 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених в Інструкції.

