



## Настінний поручень «Fit Easy»

OSD-580700

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.  
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС

## ЗМІСТ

1. Вступ.....	3
2. Заходи безпеки .....	3
3. Технічні характеристики.....	4
4. Загальна характеристика.....	4
5. Технічне обслуговування і догляд.....	4
6. Умови гарантії .....	5

## 1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте настінний поручень, не ознайомившись з Інструкцією.**

**Не використовуйте настінний поручень у випадку його пошкодження.**

**Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Настінний поручень «Fit Easy», «OSD-580700» (далі за паспортом – поручень) – рекомендований для застосування у медичних закладах та вдома.

Поручень «OSD-580700» розроблений для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

## 2. Заходи безпеки

Перед початком використання поручня або під час використання після тривалого зберігання переконайтеся, що виріб знаходиться у належному стані. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан.

1. Виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
2. **ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан поручня перед кожним використанням. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб у випадку зносу або пошкодження.
3. На разі використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично ретельно дезінфікувати його для уникнення перехресних інфекцій.
4. Перед початком використання поручня або під час використання після тривалого зберігання **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що всі частини закріплені та міцно зафіксовані.
5. Будь-які пошкодження повинні бути **УСУНУТІ**.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування ванночки, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

### 3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-580700
Матеріал:	пластмаса
Колір:	блакитний
Довжина, (см):	29
Діаметр трубки, (см):	9,5

### 4. Загальна характеристика

- ❖ Використовується для додаткової опори та підтримки рівноваги під час вставання, присідання, переміщення, підйому сходами.
- ❖ Використання: ванна та душова кімнати, сходи.
- ❖ Міцний пластик з рельєфною гумовою поверхнею.
- ❖ Тип кріплення – вакуумні присоски.
- ❖ Має Індикатор кріплення, що показує чи зафіксований поручень.

### 5. Технічне обслуговування і догляд



**Перевіряйте належну якість поручня перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкодженень або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.**

Зовнішню поверхню поручня обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте поручень у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте ванночку сухою ганчіркою після кожного використання.

**ПРИМІТКА:** Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції поручня, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



## 6. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
  - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:  
*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.**

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_