



Стілець-туалет:

OSD-BL730200

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Стілець-туалет «OSD-BL730200» (далі за паспортом – виріб / обладнання) – рекомендовано для застосування у медичних закладах та вдома людям з частковою втратою функцій опорно-рухового апарату. Розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗА УМОВ** зміни положення центру ваги за рахунок зміщення тіла або через зміну навантаження на стілець-туалет, а також нахилу на кут більше 10 градусів, підвищується можливість перекидання.
- НЕ ЗАЛИШАЙТЕ** користувача у стільці-туалеті без нагляду.
- УСТАНОВЛЮЙТЕ** стілець-туалет на рівну горизонтальну поверхню.
- АСИСТЕНТ ПОВИНЕН:**
 - перевірити належну якість стільця-туалету;
 - попереджати користувача про свої дії, особливо під час нахилу стільця-туалету.
- НЕ НАХИЛЯТИ** стілець-туалет уперед.
- МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЕ** навантаження на стілець-туалет – 136 кг. **НІКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
- НЕ НАМАГАЙТЕСЯ** вставати, сидати, робити кроки, підніматися, нахилатися самостійно: хтось завжди повинен вам допомагати.
- НЕ НАХИЛЯЙТЕСЯ**, сидячи у стільці-туалеті, намагаючись дотягтися до чого-небудь, оскільки Ви можете перевернутися!
- НА РАЗІ** використання виробу різними користувачами рекомендується систематично і ретельно мити та дезінфікувати стілець-туалет, щоб уникнути інфекції.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Модель:	OSD-BL730200
Матеріал рами:	алюміній
Ширина сидіння, (см):	45
Висота сидіння, (см):	46-58
Вага, (кг):	3,5
Максимальне навантаження, (кг):	136

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

- Поруччя стільця-туалету – фіксовані. Покриті нековзкими накладками для надійної опори для рук.
- Рама стільця виготовлена з легкого та міцного анодованого алюмінію, стійкого до корозії.
- Висота стільця-туалету регулюється кнопковим фіксатором.
- Ніжки обладнані гумовими протиковзкими наконечниками.
- Сидіння та санітарне обладнання – з'ємні, виготовлені з гіпоалергенної пластмаси.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволенними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Стілець-туалет _____ 1 шт.
- Інструкція _____ 1 прим.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
 - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____ Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «OSD-BL730200» відповідає технічним вимогам і визнано придатним для експлуатації.

Виробник: BLISS HEALTH PRODUCTS CO., LTD / БЛИСС ХЕЛС ПРОДАКТС КО., ЛТД.

No.3 Zehe Street, Tongxing East Road, Yumin Community, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, 528415, People's Republic of China / №3, Зех Стріт, Тоншин Іст Род, Юмін Ком'юніті, Сяолань Таун, Чжуншань Сіті, Гуандонг Провінс, 528415, Китайська Народна Республіка.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа». Адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2 ; Тел.: +38 (044) 232 44 51, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: № 5 від 06.01.2026

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Термін придатності виробу: див. на маркуванні.

Гарантійний термін на виріб «OSD-BL730200» – 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

