



**Підголівник з тканиною**

**OSD-BL910104**

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.  
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.

## ЗМІСТ

1. Вступ.....	3
2. Заходи безпеки .....	3
3. Технічні характеристики.....	3
4. Загальна характеристика.....	4
5. Технічне обслуговування і догляд.....	4
6. Відомості про сертифікацію.....	4
7. Умови гарантії .....	5

## 1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**УВАГА**

- Не використовуйте підголівник, не ознайомившись з Інструкцією.**
- Не використовуйте підголівник у випадку пошкодження.**
- Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Підголівник з тканиною «OSD-BL910104» (далі за паспортом – підголівник з тканиною / підголівник) – рекомендовано для застосування вдома.

Підголівник «OSD-BL910104» розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

## 2. Заходи безпеки

- Максимально допустиме навантаження на підголівник – 125 кг. **НИКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
- Виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан підголівника перед кожним використанням. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб у випадку зносу або пошкодження.
- На разі використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично ретельно дезінфікувати його для уникнення перехресних інфекцій.
- Перед початком використання підголівника або під час використання після тривалого зберігання **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що всі частини закріплені та міцно зафіксовані.
- Будь-які пошкодження повинні бути **УСУНУТІ**.
- Поверхню підголівника **ПОТРІБНО** чистити за допомогою м'якого миючого засобу. Засоби для чищення повинні бути м'якими. Можна використовувати побутові очисні засоби.
- Під час урегулювання підголівника **ОСТЕРІГАЙТЕСЯ** затиску пальців рук.



**УВАГА**

Під час повторного використання підголівника необхідно його протерти та продезінфікувати, а також провести загальний огляд технічного стану.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування підголівника, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

## 3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-BL910104
Матеріал:	сталь + сітчастий акрил
К-кість позицій регулювання, (шт.):	5
Розміри, Г x В x Ш, (см):	57 x 46 x 57
Максимальне навантаження, (кг):	125

## 4. Загальна характеристика

Підголівник призначений для людей, що потребують зміни положення з лежачого в сидяче. Підголівник має п'ять позицій урегулювання.

Усі матеріали, застосовані у виробництві, є біологічно безпечними для шкіри пацієнтів та асистентів.

Підголівник з тканиною «OSD-BL910104» поставляється у зібраному вигляді.

## 5. Технічне обслуговування і догляд



**Перевіряйте справність підголівника перед кожним використанням, якщо виріб використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. На разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.**

Підголівник з тканиною розроблений для застосування протягом тривалого часу. Термін його придатності 10 років за умов дотримання усіх правил експлуатації.

Багаторазове пересування, неправильне використання, а також тривале застосування можуть призвести до пошкоджень й ознак зносу, що може створити привід до несправності виробу, якщо не усувати такі дефекти вчасно.

### **Догляд**

Чистити поверхню підголівника необхідно м'якою ганчіркою. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати.

На разі забруднення підголівника інфекційними або потенційно небезпечними речовинами необхідно продезінфікувати миючим засобом.

Зберігайте підголівник у сухому місці, подалі від води.

Регулярно оглядайте усі компоненти підголівника на відсутність зовнішніх пошкоджень. На разі виявлення дефектів подальша експлуатація підголівника можлива тільки опісля усунення усіх несправностей. По закінченню терміну експлуатації підголівник необхідно утилізувати згідно з чинним законодавством України.

**ПРИМІТКА:** Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції підголівника, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

## 6. Відомості про сертифікацію

Підголівник з тканиною «OSD-BL910104» відповідає технічним вимогам і визнаний придатними для експлуатації.

 **Виробник:** Bliss Health Products Co.,Ltd / Блісс Хелс Продуктс Ко., Лтд.  
96 Zhaoyi Rd., Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, P.R.C. / 96, Чжаої Рд, Донгшен Таун, Жонгшан Сіті, Гуангдонг Провінс, Китай.

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

**Номер редакції:** № 2 від 08.11.2017.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

Гарантійний термін на підголівник «OSD-BL910104» – 1 рік з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.



## 7. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
  - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:  
*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.**

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_