



Стілець-туалет

OSD-LY901

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.

ЗМІСТ

1.	Вступ.....	3
2.	Заходи безпеки	3
3.	Технічні характеристики.....	4
4.	Загальна характеристика.....	4
5.	Технічне обслуговування і догляд.....	4
6.	Комплектація	4
7.	Відомості про сертифікацію.....	5
8.	Умови гарантії	6

[2]

Офіційна веб-сторінка: osd.ua

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



УВАГА Не використовуйте стілець-туалет, не ознайомившись з інструкцією.

Не використовуйте стілець-туалет у випадку його пошкодження.

Не намагайтесь внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Стілець-туалет «OSD-LY901» (далі за паспортом – стілець-туалет) – рекомендований для застосування вдома людям з частковою втратаю функцій опорно-рухового апарату.

Розроблений для максимальної зручності та безпеки користувача. Розрахований для використання у житлових приміщеннях.

2. Заходи безпеки

Перед початком використання стільця-туалету або під час використання після тривалого зберігання переконайтесь, що всі частини закріплені та міцно зафіковані. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан.

1. За умов зміни положення центру ваги за рахунок зміщення тіла або через зміну навантаження на стілець-туалет, а також нахилу на кут більше 10 градусів, підвищується можливість перекидання.
2. **НЕ** залишайте користувача у стільці-туалеті без нагляду.
3. Установлюйте стілець-туалет на рівну горизонтальну поверхню.
4. Асистент повинен:
 - перевірити належну якість стільця-туалету;
 - попереджати користувача про свої дії, особливо під час нахилу стільця-туалету;
 - **НЕ** нахиляти стілець-туалет уперед.
5. Максимально допустиме навантаження на стілець-туалет – 300 кг. **НИКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
6. **НЕ** намагайтесь вставати, сідати, робити кроки, підніматися, нахилятися самостійно: хтось завжди повинен вам допомагати.
7. **НЕ** нахиляйтесь, сидячи у стільці-туалеті, намагаючись дотягтися до чого-небудь, оскільки Ви можете перевернутися!
8. На разі використання виробу різними користувачами рекомендується систематично і ретельно мити та дезінфіковати стілець-туалет, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування стільця-туалету, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-LY901
Ширина сидіння, (см):	43
Висота сидіння, (см):	42-52
Вага, (кг):	5,5
Максимальне навантаження, (кг):	300

4. Загальна характеристика

Поручня стільця-туалету – фіксовані. Покриті пластмасовими накладками.

Рама стільця-туалету виготовлена з анодованого алюмінію.

Висота стільця-туалету регулюється кнопковим фіксатором.

Ніжки стільця-туалету обладнані гумовими противозливими наконечниками.

М'яка знімна кришка-сидіння виготовлене зі штучної шкіри.

Туалетне сидіння, спинка і накладки на підлокітниках виготовлені з гігієнічного пластику, який легко чистити та дезінфікувати неагресивними миючими засобами.

5. Технічне обслуговування і догляд



УВАГА Перевіряйте справність стільця-туалету перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на шість місяців. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

Зовнішні поверхні стільця-туалету обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте стілець-туалет у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Металеві частини очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте стілець-туалет ганчіркою після кожного використання.

6. Комплектація

- | | |
|-------------------|---------|
| 1. Стілець-туалет | 1 шт. |
| 2. Інструкція | 1 прим. |

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції стільця-туалету, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

7. Відомості про сертифікацію

Стілець-туалет «OSD-LY901» відповідає технічним вимогам і визнаний придатними для експлуатації.



Виробник: Foshan Nanhai Anjian Medical Equipment Parts Co., Ltd / Фошан Нангаі Анджиан Медікал Еквіпмент Партс

№.3 Xinji Industrial Park, Xiqiao Town, Nanhai District, Foshan City, Guandong Province, China / №.3 Ксінджи Індастріал Парк, Ксікуао Таун, Нангаі Дістрікт, Фошан Сіті, Гуандонг Провінс, Китай

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 5 від 05.03.2019.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін на **стілець-туалет «OSD-LY901»** – 1 рік з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.



8. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (четирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____