



Крісло-туалет

OSD-MOD-WAVE2

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС

ЗМІСТ

1. Вступ.....	3
2. Заходи безпеки	3
3. Технічні характеристики.....	4
4. Загальна характеристика.....	5
5. Технічне обслуговування і догляд.....	5
6. Комплектація	6
7. Відомості про сертифікацію.....	7
8. Умови гарантії	8

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією та дотримуйтеся її під час використання виробу.



Не використовуйте крісло-каталку, не ознайомившись з Інструкцією.

Не використовуйте крісло-каталку у випадку її пошкодження.

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Крісло-каталка з санітарним оснащенням «OSD-MOD-WAVE2» (далі за паспортом – крісло-каталка / каталка / крісло-туалет) – рекомендована для застосування у медичних закладах та вдома людям з частковою втратою функцій опорно-рухового апарату. Використовується як пересувне санітарно-гігієнічне обладнання, яке не розраховане для транспортування пацієнтів.

Крісло-каталка «OSD-MOD-WAVE2» розроблена для максимальної зручності та безпеки користувача. Розрахована для використання у житлових приміщеннях.

2. Заходи безпеки

Перед початком використання крісла-каталки або під час використання після тривалого зберігання переконайтеся, що всі частини закріплені та міцно зафіксовані. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан.

1. Для подолання перешкод обов'язково використовуйте виїзні пандуси та платформи.
2. Майте на увазі, що за умов зміни положення центру ваги за рахунок зміщення тіла або через зміну навантаження на крісло-каталку, а також нахилу на кут більше 10 градусів, підвищується можливість перекидання.
3. **ЗАВЖДИ** необхідно ставити колеса на гальма, якщо ви сідаєте або встаєте з крісла-каталки.
4. Під час руху без гальмування у напрямку перешкод (бордюр, сходинка тощо) існує небезпека випадіння з крісла-каталки.
5. **НЕ** залишайте користувача у кріслі-каталці без нагляду, навіть, якщо вона стоїть на гальмах.
6. Асистент повинен:
 - перевірити належну якість крісла-каталки;
 - **НЕ** розганяти крісло-каталку занадто швидко, не змінювати різко напрямок руху;
 - стежити за колінами та ліктями користувача для запобігання ушкоджень (двері, гострі кути тощо);
 - **НЕ** відпускати крісло-каталку;
 - **НЕ** нахилати крісло-каталку вперед.

7. Максимально допустиме навантаження на каталку – 159 кг. **НІКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
8. **НЕ** намагайтеся вставати, сідати, робити кроки, підніматися, нахилитися самостійно: хтось завжди повинен вам допомагати.
9. **НЕ** використовуйте виріб на ескалаторах або рухомих доріжках.
10. **НЕ** нахиляйтеся, сидячи у кріслі-каталці, намагаючись дотягтися до чого-небудь, оскільки Ви можете перевернутися!
11. **ЗАВЖДИ** перевіряйте стан та товщину коліс перед використанням крісла-каталки у душі.
12. Остерігайтеся будь-яких гарячих джерел, особливо цигарок, оскільки оббивний матеріал **НЕ ВОГНЕСТІЙКИЙ**.
13. На разі використання виробу різними пацієнтами рекомендується систематично і ретельно мити та дезінфікувати каталку, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування крісла-каталки, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-MOD-WAVE2
Матеріал рами:	сталь
Конструкція рами:	розбірна
Поруччя:	фіксовані
Ширина сидіння, (см):	46
Висота сидіння від підлоги, (см):	52,5

Діаметр коліс, (дюйм):	5"
Тип коліс:	литі
Вага, (кг):	10,3
Максимальне навантаження, (кг):	159

4. Загальна характеристика

Колеса

Крісло-каталка має литі передні та задні колеса. На задніх колесах є гальма, які за необхідності дозволяють надійно зафіксувати крісло-каталку.

Поруччя

Крісло-каталка обладнана фіксованим поруччям з пластмасовими накладками.

Рама

Рама крісла-каталки виготовлена зі сталі з антикорозійним покриттям, що гарантує міцність конструкції та тривалий термін експлуатації виробу. Розбірна конструкція рами дозволяє компактно скласти крісло-туалет для зберігання та транспортування без застосування додаткових інструментів та спеціальних фізичних зусиль.

Сидіння та спинка

М'яке сидіння та спинка стільця виконані з неалергенного вінілового покриття, що зберігає тепло й легко миється.

Санітарне оснащення

З'ємне санітарне обладнання крісла-каталки виготовлене з пластмаси, що сприяє легкому відмиванню.

5. Технічне обслуговування і догляд



Перевіряйте справність крісла-каталки перед кожним використанням, якщо каталка використовується не регулярно, то оглядайте її мінімум раз на шість місяців. У разі поломки або несправності, пошкодження або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

Драпіровка та обшиті деталі

Деталі з обшивкою витримують вплив води та м'яких миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Для видалення залишків води з поверхні крісла-каталки застосовуйте суху ганчірку. Якщо крісло-каталка використовується декількома людьми, то рекомендуємо систематично дезінфікувати, щоб уникнути інфекцій.

Рама та металеві частини

Завжди тримайте крісло-каталку в чистоті. Металеві частини очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте крісло-каталку ганчіркою після кожного використання.

Гальма

Гальма можуть змінювати свій стан залежно від стану коліс, також на них негативно впливають бруд і сторонні предмети. Періодично перевіряйте гальмівний механізм. За необхідності використовуйте щітку для видалення бруду та сторонніх предметів (волосся тощо). За умов ушкодження гальм зв'яжіться з механіком.

Колеса

Колеса виготовлені з міцного матеріалу, тому не вимагають додаткового догляду. Проте, їх слід періодично оглядати, щоб подовжити термін служби.

6. Комплектація

1. Крісло-каталка 1 шт.
2. Спинка 1 шт.
3. Сидіння 1 шт.
4. Санітарне обладнання 1 шт.
5. Стільчак 1 шт.
6. Інструкція 1 прим.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції крісла-каталки, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

7. Відомості про сертифікацію

Виріб «OSD-MOD-WAVE2» відповідає технічним вимогам і визнана придатною для експлуатації.



Виробник: BLISS HEALTH PRODUCTS CO., LTD / БЛИСС ХЕЛС
ПРОДАКТС КО., ЛТД. No.3 Zehe Street, Tongxing East Road,
Yumin Community, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong
Province, 528415, People's Republic of China / №3, Зех Стріт,
Тоншин Іст Род, Юмін Ком'юніті, Сяолань Таун, Чжуншань
Сіті, Гуандонг Провінс, 528415, Китайська НароднаРеспубліка.



Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя
Жовтня), 100/2. Тел.: +38 (044) 232-44-51, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: №4 від 06.01.2026.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Термін придатності виробу: див. на маркуванні.

Гарантійний термін на **виріб «OSD-MOD-WAVE2»** – 12 місяців з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотна доставка здійснюється за рахунок клієнта.



8. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених в Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____