

Стілець-туалет з відкидними підлокітниками OSD-RB-2107D

Інструкція користувача



Дякуємо, що віддали перевагу нашому виробу.

Будь-ласка уважно ознайомтеся з цією інструкцією і дотримуйтеся її під час використання виробу.



Цей виріб відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЕЕС



Попередження!

- До початку експлуатації ретельно вивчіть інструкцію.
- Завжди перевіряйте, що пристрій знаходиться в робочому стані, перш ніж використовувати його. Не використовуйте виріб у випадку пошкодження.
- Виріб вже готовий до експлуатації і не передбачає будь-якого технічного втручання.
- Максимальне навантаження 136 кг. ніколи не перевищуйте цей ліміт.

ЗМІСТ

1. ОПИС
2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ
4. ДОГЛЯД ЗА ВИРОБОМ
5. ГАРАНТІЯ

1. ОПИС

Стілець-туалет OSD-RB-2107D належить до санітарно-гігієнічних виробів, що використовується для полегшення догляду за пацієнтами в період реабілітації, а також призначений для людей з обмеженими фізичними можливостями. Стілець виготовлений зі сталевोї рами, оснащений також пластиковим туалетним судном з протикрапельною системою та зручною кришкою в центральній частині сидіння. Для зручності стілець оснащений відкидними підлокітниками, які спрощують пересаджування. М'який полімерний матеріал на підлокітниках не дозволяє рукам ковзати. Ніжки стільця оснащені гумовими наконечниками, що не ковзають.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал рами: сталь
Ширина сидіння: 47 см
Висота сидіння: від 45 до 56 см
Підлокітники: відкидні
Вага: 6,3 кг
Максимальне навантаження: 136 кг

3. ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ


Витягніть усі елементи стільця з картонної упаковки, звільніть від пакувального матеріалу. Приєднайте по черзі всі ніжки до рами стільця. Зверніть увагу, що вони телескопічні, тому обов'язково виберіть потрібну висоту і встановіть на однаковому рівні всі ніжки (обов'язково перевірте кнопки фіксації). Встановіть спинку стільця у відповідні отвори на задній частині рами стільця. Остерігайтеся затискання пальців! Встановіть відро і стільчак у хрестовину рами. Стілець для туалету з відкидними підлокітниками готовий до використання!

УВАГА: Сидячи на стільці, тримайтеся за підлокітники, щоб уникнути падіння.

4. ДОГЛЯД ЗА ВИРОБОМ

Стілець треба мити теплою водою з м'якими миючими засобами. Не застосовуйте при чищенні агресивні засоби та абразивні речовини. Протирайте сухою м'якою тканиною. При необхідності обробляйте дезінфікуючими речовинами. Після обробки протирайте насухо.

5. ГАРАНТІЯ

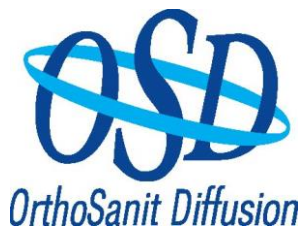

Умови гарантії:

ТОВ "ОСД Східна Європа" гарантує відсутність заводських дефектів й роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації викладених у інструкції;
 - б) при наявності ознак слідів стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу тощо);
 - в) якщо пристрій використовувався у не по прямому призначенню.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України "Про захист прав споживачів":
Обмін товару належної якості проводиться за умови, що він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів може бути змінена виробником без попереднього повідомлення.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____