



Насадка на унітаз із кришкою:
SC7060D-6

Інструкція

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Насадка на унітаз із кришкою «SC7060D-6» (далі за паспортом – виріб / туалетне сидіння / сидіння для туалету / насадку / санітарно-гігієнічне обладнання / обладнання) – рекомендовано для застосування у медичних закладах та вдома.

Виріб розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача. Відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.



Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будь-які характеристики, зазначені у цій Інструкції. Усі дані, зазначені в Інструкції, наведені для ознайомлення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
2. **ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** його у випадку зносу або пошкодження.
3. **НЕОБХІДНО** періодично оглядати виріб на стійкість.
4. **КОРИСТУВАЧАМ** з обмеженими фізичними можливостями **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** звертатися за допомогою до асистента.
5. **У ВИПАДКУ** використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути інфекції.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.



Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкодження або розривів одного або декількох деталей, **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Різновид виробу:	насадка на унітаз
Колір:	білий
Матеріал::	гігієнічна пластмаса
Збільшує висоту унітазу, (см):	на 15
Глибина сидіння, (см):	39
Ширина сидіння, (см):	35
Розмір отвору, (см):	21 x 28
Комплектація:	кришка, 2 фіксатори
Максимальне навантаження, (кг):	100
Вага виробу, (кг):	1,8
Гарантійний термін, (міс.):	12

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

- Насадка анатомічної форми з кришкою для стаціонарних унітазів.
- Виготовлена з гігієнічної пластмаси, швидко нагрівається до температури тіла та легко дезінфікується.
- Призначення: допомога при встановленні та присаджуванні на унітаз після травм та операцій у ділянці тазостегнового суглоба, при слабкості ніг у літньому віці тощо.
- Туалетне сидіння підлаштовується під ширину унітазу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Розпакуйте насадку для унітазу.
2. Насадка легко фіксується до бортів унітазу за допомогою 2-х регульованих затискачів. Тип кріплення підходить для більшості унітазів. Встановлення не потребує спеціальних фізичних зусиль.
3. Переконайтеся, що насадка встановлена рівно та надійно.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволенними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених в Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____ Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «SC7060D-6» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

Виробник: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. No. 168, Fusheng Rd, Fuwan Industry Area, Gaoming District, Foshan City, Guangdong province, P.R. China / ФОШАН САНКЕА МЕДІКАЛ ПРОДАКТС КО., ЛТД. №168, Фушенг Рд, Фуван Індустрі Ерія, Гаомінг Дістрікт, Фошан Сіті, Гуандонг Провінс, П.Р. Китай

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 3 від 08.12.2021.

Термін придатності виробу: див. на маркуванні.

Гарантійний термін на виріб «SC7060D-6»: 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених в Інструкції.

