



Санітарно-гігієнічне обладнання: SN03BAS29/SN03BAS40/SN03BAC04

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.

**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтесь внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Санітарно-гігієнічне обладнання «SN03BAS29 / SN03BAS40 / SN03BAC04» (далі за паспортом – виріб / поручень) – розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком використання виробу або під час використання після тривалого зберігання переконайтесь, що усі частини закріплені та міцно зафіковані. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан.

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіковані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** його у випадку зносу або пошкодження.
- НЕОБХІДНО** періодично оглядати виріб на стійкість.
- КОРИСТУВАЧАМ** з обмеженими фізичними можливостями **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** звертатися за допомогою до асистента.
- У ВИПАДКУ** використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настінні поручні

Параметр	Значення		
Модель:	SN03BAS29	SN03BAS40	SN03BAC04
Матеріал:	ABS-пластмаса		
Колір:	білий		
Довжина, (см):	29,5	41,5	50
Діаметр трубки, (см):	9,5		
Відстань від стіни, (см):	6		

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Використовується для додаткової опори та підтримки рівноваги під час вставання, присідання, переміщення, підйому сходами.
- Використання: ванна та душова кімнати, сходи.
- Міцна ABS-пластмаса з рельєфною гумовою поверхнею.
- Тип кріплення – вакуумні присоски.
- Має 2 індикатори кріплення, що вказують на фіксацію поручня: червоний колір - поручень зафіковано невірно, а зелений колір означає, що поручень готовий до експлуатації.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.**



УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 24 місяці з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - порушення правила експлуатації, викладених в Інструкції;
 - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
 - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристроя.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (четирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Санітарно-гігієнічне обладнання «SN03BAS29 / SN03BAS40 / SN03BAC04» відповідає технічним вимогам і визнано придатним для експлуатації.

Виробник: Pharmaouest Industries / Фармаuest Індастріс / ЛМ Глобал Дизайн Лтд.
 Z.A. Actipole 35, 2 rue de Saint Coulban - BP12,35540 Miniac Morvan, France / З.А. Актіполь 35, 2 рю де Сан Кульбан - БП12, 35540 Міньяк Морван, Франція.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 3 від 12.07.2021.
Дата виготовлення: див. на упаковці.
Термін придатності виробу: див. на маркованні.
Гарантійний термін на санітарно-гігієнічне обладнання «SN03BAS29 / SN03BAS40 / SN03BAC04» – 2 роки з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.