



# Інструкція по застосуванню стерильних голки для акупунктури

## ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією. Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження. Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Акупунктура (лат. acus — голка та лат. punctura — укол) — лікувальний метод, що полягає у подразненні периферичних нервових розгалужень за допомогою уколів у певні точки тіла (всього таких точок налічується понад 600). Акупунктура належить до основних методів китайської народної медицини; у Китаї відома з II століття до н. е. З найбільшим ефектом методом акупунктури лікують захворювання периферичної нервової системи — радикуліт, ішіас та ін., а також ревматизм.

Розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** його у випадку пошкодження.
- ЯКЩО ВІЯВЛЕНО** несправність, то **НЕ ПРОВОДЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
- ВИРІБ ПОТРІБНО ЗБЕРІГАТИ** у сухому, добре вентильованому та прохолодному місці, захищеному від впливу високих температур, високої вологості, пилу або прямих сонячних променів.
- УНИКАЙТЕ** ударів і трясіння.
- ВИРІБ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ** тільки кваліфікованими лікарями голкотерапії.
- ГОЛКИ ДЛЯ АКУПUNKТУРИ** стерилізуються газоподібним етиленоксидом тільки для одноразового використання.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** голки, якщо упаковка пошкоджена або перевищено термін придатності! Викиньте невикористані голки!
- ОБЕРЕЖНО ПРОВОДЬТЕ** акупунктуру за допомогою електричної стимуляції.
- ПРАВИЛЬНО УТИЛІЗУЙТЕ** виріб після використання.
- ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ** на дату виготовлення на упаковці.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

## ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Голки для стерильної голкотерапії складаються з двох частин: корпус та рукоятка, матеріал корпусу голки — аустенітна нержавіюча сталь SUS304. Вони поставляються у діаметрі від 0,25 мм до 0,30 мм, з різною довжиною тіла голки від 25 мм до 50 мм, з трубкою або без неї.

## ПРОТИПОКАЗАННЯ

- За наявності онкологічних пухлин.
- При гіпертонії.
- При поганому згортанні крові.
- При загостреннях та/або хронічних захворюваннях шлунку і серця.
- Доброякісні та злоякісні утворення.
- Гострі інфекційні захворювання.
- Психічне збудження.
- Вагітність.
- Сильне виснаження організму.
- Туберкульоз відкритої форми.

## ПОБІЧНА ДІЯ

Побічні реакції після голкорексфлексотерапії: пневмоторакс, гемаатома, зламана або застрягла голка, алергічні реакції тощо.

## ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте виріб упакованим у добре провітрюваному та очищеному місці, уникайте тривалого впливу високої температури та вологості.

## НАЛЕЖНА УТИЛІЗАЦІЯ ПРОДУКТУ

Цей символ на приладі або у паспорті до нього вказує, що даний продукт не підлягає утилізації разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Для запобігання можливої шкоди для навколишнього середовища або здоров'я людини через неконтрольовану утилізацію відходів, будь ласка, відокремте цей прилад від інших типів відходів і утилізуйте його належним чином для раціонального повторного використання матеріальних ресурсів.

Даний продукт не містить ніяких шкідливих речовин.



## УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
  - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.**

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_

## ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

**Виріб** відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.



**Виробник:** Suzhou Medical Appliance Factory / Сужоу Медікал Епплаєнс Фекторі.

№ 18 Huatuo Rd., SSTT, 215163 Suzhou New District, China / № 18 Хуатую Рд., ССТТ, 215163, Сужоу Нью Дістрікт, Китай.

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

**Номер редакції:** № 3 від 13.02.2020.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

**Термін придатності виробу:** 3 роки.

**Гарантійний термін на виріб** — 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

