



Пахвові милиці:

SC1002

Інструкція

## ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією та дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією. Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження. Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Милиці «SC1002» (далі за паспортом — виріб / обладнання / пахвові милиці / пахвові / милиці) — рекомендовані для застосування у медичних закладах та вдома.

Виріб розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача. Відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.



**Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будь-які характеристики, зазначені у цій Інструкції. Усі дані, зазначені в Інструкції, наведені для ознайомлення.**

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб у випадку зносу або пошкодження.
- ЯКЩО ВІЯВЛЕНО** несправність, то **НЕ ПРОВОДЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
- ВЧАСНО** замінійте наконечники!
- БУДЬТЕ ОБАЧНІ** на нерівних поверхнях.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб на сходах та ескаляторах.
- БУДЬТЕ ОБАЧНІ** на слизькій дорозі. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб, як інструмент для спуску або засіб для самозахисту.
- МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ** на виріб – 120 кг. **НИКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** ручку виробу в якості підставки для ніг або оперття для сидіння.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.



**Використовуйте милиці тільки у якості опори для рук під час пересування. Не використовуйте виріб, як засіб для самозахисту. Максимальне навантаження – 120 кг. Не перевищуйте цей ліміт.**

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Різновид:	пахвові
Класифікація:	універсальна
Конструкція:	регульована
Колір:	бежевий
Матеріал:	алюміній
Матеріал руків'я:	гумова подушечка
Загальна висота, (см):	від 112 до 132
Діаметр трубки, (см):	2,2
Максимальне навантаження, (кг):	120
Гарантія, (міс.):	12
Країна реєстрації бренду:	Італія
Країна-виробник:	Китай

## ВИКОРИСТАННЯ

### Налаштування висоти милиці

Для того, щоб відрегулювати необхідну висоту милиці потрібно взяти нижню частину трубки, натиснути на кнопку та потягнути за верхню та нижню частини милиці. Кнопка повинна попасти та бути зафіксованою в необхідному отворі.



**Використовуйте наконечники для запобігання пошкодженню.**

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

**ПРИМІТКА:** Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



**Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкодженню або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.**

## УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених в Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
  - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.**

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_

## ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

**Виріб «SC1002»** відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

**Виробник:** FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. No. 168, Fusheng Rd, Fuwan Industry Area, Gaoming District, Foshan City, Guangdong province, P.R. China / ФОШАН САНКЕА МЕДІКАЛ ПРОДАКТС КО., ЛТД. № 168, Фушенг Рд, Фуван Індустрі Ерія, Гаомінг Дістрікт, Фошан Сіті, Гуандонг Провінс, П.Р. Китай.

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

**Номер редакції:** № 3 від 15.12.2021.

**Термін придатності виробу:** див. на маркованні.

**Гарантійний термін на виріб «SC1002»:** 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених в Інструкції.

