



Ходунки колісні:

OSD-66001

Інструкція

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Ходунки колісні «OSD-66001» (далі за паспортом — виріб / ходунці) — рекомендовано для застосування у медичних закладах та вдома.

Виріб розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача. Відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.



Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будь-які характеристики, зазначені у цій Інструкції. Усі дані, зазначені в Інструкції, наведені для ознайомлення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** у випадку зносу або пошкодження.
- ЯКЩО ВІЯВЛЕНО** несправність, то **НЕ ПРОВОДЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
- БУДЬТЕ ОБАЧНІ** на нерівних поверхнях.
- НІКОЛИ** не сидіть на ролері, штовхаючи себе уперед ногами.
- ГАЛЬМА ПОВИННІ** бути у «паркувальному» положенні, коли ролер використовується як сидіння.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб на сходах та ескалаторах.
- МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ** на виріб – 136 кг. **НІКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
- У ВИПАДКУ** використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.



Використовуйте ролер тільки у якості опори для рук під час пересування. Не використовуйте виріб, як інвалідний візок. Максимальне навантаження – 136 кг. Не перевищуйте цей ліміт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Різновид:	на колесах
Конструкція:	складана
Матеріал рами:	алюміній
Матеріал руків'я:	гума
Ширина, (см):	58
Сидіння, Ш x Д, (см):	44 x 26,6
Висота ручок, (см):	86 - 99
Висота сидіння від підлоги, (см):	59
Розмір передніх коліс, (дюйми):	10"
Розмір задніх коліс, (дюйми):	8"
Вага виробу, (кг):	7,5
Максимальне навантаження, (кг):	136
Гарантія, (міс.):	12

ВИКОРИСТАННЯ

Розкладання

- Розкладіть раму.
- Відрегулюйте бажану для користувача висоту за допомогою ручок.
- Перевірте «ходові якості» ролера.

Гальма

Важливо, щоб гальма були у «паркувальному» положенні. Для гальмування потягніть руків'я догори.

Регулювання висоти ручок

Для регулювання висоти ручок потрібно відкрити фіксуючі важелі та відрегулювати опертя на відповідній висоті. Опора ніколи не повинна бути вище, ніж зазначено на трубках з рельєфними насічками. Ручки потрібно розташувати на висоті зап'ястя. Затягувати стопорні важелі треба таким чином, щоби вони були направлені донизу. Для того, щоб повернути важіль, треба спочатку потягнути його назовні.



Перевіряйте гальмівний механізм після урегулювання висоти руків'я. Переконайтеся, що всі кріплення надійно затягнуті та зафіксовані.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволенними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломок або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.



УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених в Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
 - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____ Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «OSD-66001» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

Виробник: Zhongshan Qunn Medical Equipment Co., Ltd. / Жонгшан Куїнн Медікал Еквіпмент Ко., Лтд.

3rd Booth No. 108 Zhaoyi Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong, The people's republic of China / 3 Бус №108 Чжаої Род, Донгшенг Таун, Жонгшан Сіті, Гуангдонг, Китайська народна республіка.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський, 100/2.

Тел.: +38 (044) 232 44 51, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: № 2 від 17.07.2023.

Термін придатності виробу: див. на маркованні.

Гарантійний термін на виріб «OSD-66001»: 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених в Інструкції.

